



THUASNE

MOBIDERM
STIMULERAR OCH
MOBILISERAR LYMF-
SYSTEMET

Mobiderm
Autofit
sid 10



MOBIDERM

Mobiliserar lymfödemet under natten

Mobiderm är ett strukturerat material bestående av kuber inneslutna i ett lätt elastiskt material. Det som gör Mobiderm till ett unikt och patenterat material är att alla kuber är placerade på olika sätt. Vissa pekar uppåt, andra nedåt eller är vridna åt olika håll. På så vis applicerar varje enskild kub olika tryck på vävnaden och påvekar lymfödemet på olika sätt.


Den **oregelbundna** placeringen av kuberna skapar en effektiv mikromassage där lymfvätska under kuber med högre tryck pressas undan till områden med lägre tryck. Mobiliseringen aktiverar lymfsystemets kollektorer vilket sätter fart på hela lymfsystemet.

Lymfödemet kontrolleras samtidigt som fibrotisk vävnad bearbetas och luckras upp. Flera studier* visar att brukare som använder Mobiderm under natten motverkar återsvullnad, något som annars är ett vanligt förekommande problem.

De bästa av allt? Allt sker under natten, när brukaren sover.

Mobiderm är nämligen avsett att användas vid vila eller under natten. Brukaren vaknar utvilad efter lång natts sömn och får lättare att ta på sig sina medicinska kompressionsstrumpor för användning under dagen.

Mobiderm är tillgängligt i två strukturer, stora kuber som lämpar sig bäst för större vävnader, och små kuber för mindre vävnader som exempelvis hand- och fottryggar.

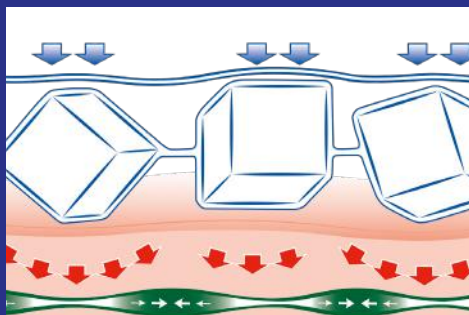

Strukturens genomtänkt oregelbundna design sätter fart på lymfsystemet.



Stora kuber 15x15 mm




Små kuber 5x5 mm



I denna broschyr refererar vi till filmer som finns på vår kanal på YouTube. Du hittar vår kanal genom att söka efter "Thuasne Scandinavia".

(1) Mestre -Intérêt du manchon de compression nocturne auto-ajustable Mobiderm Autofit dans la phase de maintien du traitement du lymphoedème du membre supérieur: l'étude pilote Marilyn-Support Care Cancer (25/2455-2462) -2017 - Pages 6 & 7

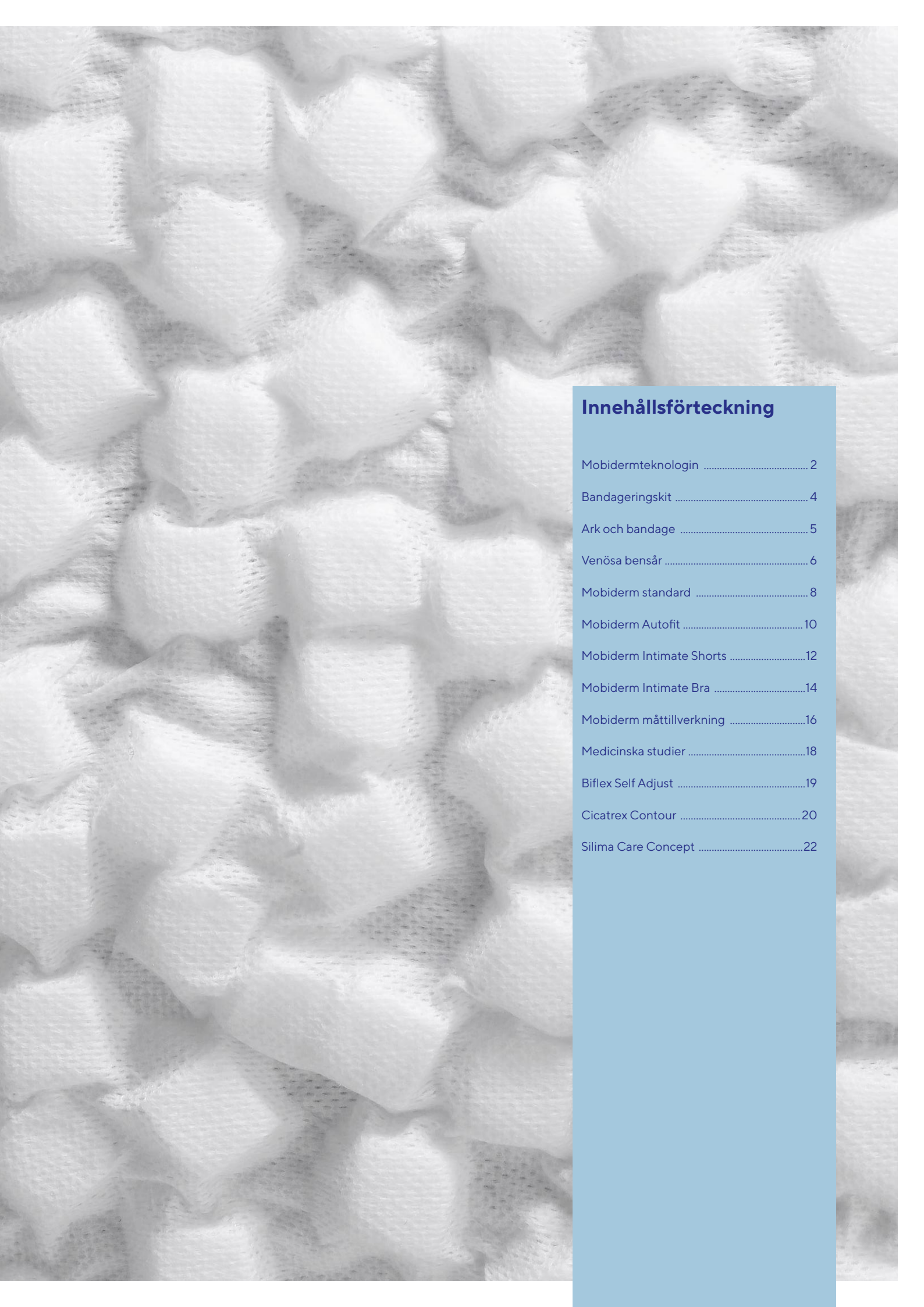

Innehållsförteckning

Mobidermteknologin	2
Bandageringskit	4
Ark och bandage	5
Venösa bensår	6
Mobiderm standard	8
Mobiderm Autofit	10
Mobiderm Intimate Shorts	12
Mobiderm Intimate Bra	14
Mobiderm måttillverkning	16
Medicinska studier	18
Biflex Self Adjust	19
Cicatrex Contour	20
Silima Care Concept	22

MOBIDERM

I reduktionsfasen

Visste du att vi tillverkade bandage redan på 1800-talet? Elastiska och kompressiva bandage är därför en av våra specialiteter.

Vi är extra stolta över kvaliteten på våra bandage och lindor. Med över 180 års erfarenhet har vi en enorm kunskap och kompetens inom området. Våra Biflex-bandage tillverkas än idag i samma fabrik i St Etienne, Frankrike, även om stickningsmaskinerna har uppdaterats sedan företaget grundades 1847. Vi har full kontroll över hela tillverkningsprocessen och kan garantera att våra material inte innehåller några otillåtna ämnen eller substanser.

Studier visar att du kan uppnå maximal ödemreducering snabbare genom att inkludera ett bandage med Mobidermstruktur i en multilagersbandagering jämfört med ett normalt polstringsmaterial. Det innebär att du kan spara både tid och pengar men ändå uppnå samma fina resultat.

Sedan 2021 erbjuder vi kompletta kit med allt du behöver för att behandla en arm eller ett ben. Dessa kit innehåller bland annat bomullslinda, Mobidermbandage och elastiska kompressionsbandage. Våra kompressionsbandage visar förresten



Genom att inkludera Mobidermstruktur i en multilagersbandagering kan du spara mycket tid och pengar.

med integrerade guider hur hårt du ska linda och hur mycket eller lite du ska överlappa för att korrekt kompression ska appliceras.

Använder du förresten kompressionspump som del i din behandling? Studier från ett behandlingscenter i Warszawa, Polen, visar att patienter som kombinerar behandlingen med Mobiderm fick bättre resultat med lägre tryck under kortare tid jämfört med patienter som inte använde Mobiderm.

Mer information om studier på sida 18.

Kompletta kit för multilagersbandagering av arm och ben



Art nr 37009029999902

Bandageringskit för ben

- 1 st Biflex 16+ bandage, 10 cm x 3 m
- 1 st Biflex 16+ bandage, 10 cm x 5 m
- 1 st Biplast bandage, 3 cm x 2.5 m
- 2 st kortsträcks bomullsbandage, 11 cm x 4 m
- 3 st Mobiderm bandage, 10 cm x 3 m
- 2 st Biflexideal bandage, 10 cm x 5 m



Art nr 37009029999901

Bandageringskit för arm

- 1 st Biflex 16+ bandage, 8 cm x 5 m
- 1 st Biplast bandage, 3 cm x 2.5 m
- 1 st kortsträcks bomullsbandage, 11 cm x 4 m
- 2 st Mobiderm bandage, 10 cm x 3 m
- 1 st Biflexideal bandage, 10 cm x 5 m



På YouTube finns en film som visar exempel på multilagersbandagering med Mobiderm.


MOBIDERM MATERIAL

Ark och bandage med Mobidermstruktur

Med våra ark och bandage kan du punktmarkera särskilda områden som du vill behandla lite extra.

Du kan exempelvis klippa ut en pelott från ett ark och placera denna vid hand- eller fottryggen i kombination med kompressivt material. Våra bandage med Mobidermstruktur används med fördel i kombination med elastiska bandage under reduceringsfasen för att minimera ett ödem.

Vi har även kompletta bandageringskit för både arm och ben som innehåller allt du behöver för att göra en effektiv multilagersbandagering.

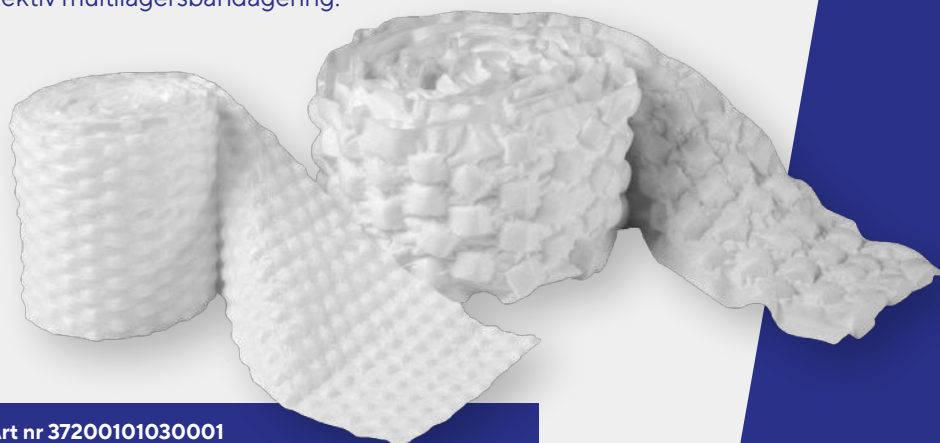

Art nr 37200101030001

Bandage med små kuber 300x10 cm

Art nr 37200101030002

Bandage med stora kuber 300x10 cm



Art nr 37100102502501

Ark med små kuber 25x25 cm

Art nr 37100103310001

Ark med små kuber 100x25 cm

Art nr 37100103310002

Ark med stora kuber 100x20 cm

Materialsammansättning:

Non woven. Kuber: polyuretanskum (15x15 mm), polytylenskum (5x5).
Se etikett för detaljerad information.

Venösa bensår

läker snabbare med aktiv polstring

En av de svårare utmaningarna för sjukvården idag är behandling av venösa bensår. Förutom lidandet som drabbar patienten är behandlingen oerhört kostsam för samhället.

Orsakerna bakom ett bensår kan vara många, men beror ofta på en nedsatt förmåga i vensystemet. Ofta är bensår även förknippade med ödemproblematik och ibland även fibrotisk vävnad. Betydelsen av att reducera eventuella ödem och mjuka upp fibrotisk vävnad är avgörande för att nå ett lyckat behandlingsresultat.

Vikten av att reducera eventuellt ödem

Finns det ett ödem i sårområdet är det nödvändigt att reducera detta så mycket som möjligt. Ett obehandlat ödem kan på sikt ge upphov till inflammation och fibrotisk vävnad vilket har en ytterligare försvårande inverkan. Genom att minska mängden vätska i den omgivande vävnaden avlastas trycket i venerna. Detta underlättar transporten i venerna och minskar risken för ytterligare skada. När ödemet minskar, ökar möjligheten för att näring och syre når fram till det drabbade området vilket minskar risken för vävnadshypoxi och vävnadsdöd.

Nya smarta bandage med guider

Kompressionsbehandling med bandagering är det mest beprövade och effektivaste sättet att reducera ödem. Viktigt att tänka på är att bandaget måste appliceras med tillräckligt hårt tryck samtidigt som kompressionen är gradvis avtagande längs benet. Annars riskerar man att strypa cirkulationen och orsaka ytterligare problem. Ytterligare en faktor att tänka på är hur bandaget överlappas. För lite överlappning leder till lägre tryck medan för mycket överlappning innebär högre tryck.

Våra Bilfex kompressionsbandage har integrerade tryckta guider i materialet som dels visar hur hårt bandaget ska lindas, och dels hur det ska överlappas, för att rätt avtagande tryck ska appliceras. På så sätt erhålls alltid en konsekvent behandling oavsett vem som bandagerar patienten, vilket är nödvändigt för att få ett snabbt behandlingsresultat.



Ett exempel på effektiv multilagers-bandagering aktiv polstring i form av Mobiderm-struktur som löser upp fibrotisk vävnad och stimulerar ödemreduceringen.

Aktivt polstringsmaterial ger oöverträffad reduktion av alla former av ödem

För att ett kompressionsbandage ska fungera optimalt måste benet vara så cirkulärt som möjligt. Man använder därför olika sorters polstringsmaterial för att fylla ut anatomiska variationer. Genom att använda ett så kallat *aktivt polstringsbandage* får man en polstring som inte bara optimerar bandagets effekt, det bidrar även till att mjuka upp fibrotisk vävnad och aktivera cirkulationen.

Mobiderm är ett aktivt polstringsmaterial som är kliniskt testat, se sida 18, och tillgängligt i alla regioner i Sverige. Materialets struktur består av en oregelbundet placerad kubstruktur som skapar en effektiv mikromassage där ödem under kuber med högre tryck pressas undan till områden med lägre tryck. Mobiliseringen stimulerar bland annat lymfsystemets kollektorer vilket accelererar ödemreduceringen.

Klinisk evidens

för aktivt polstringsbandage



Vårt aktiva polstringsmaterial Mobiderm har deltagit i många studier, runt om i världen.

I Indien genomförde *Anita Dahr* en studie¹ med 50 kvinnor för mäta skillnaden mellan att använda ett aktivt polstringsmaterial (Mobiderm) med ett passivt polstringsmaterial av bomull. Båda grupperna behandlades i 14 dagar med multilagersbandagering. Resultatet visade att gruppen med Mobiderm fick dubbelt så bra ödemreducering. Resultatet mättes både med hjälp av omfångsmått var 5:e centimeter och med water displacement (volymetri).


I Malaysia inkluderades nio patienter med venösa bensår i en studie² där de fick multilagers bandagering med aktivt polstringsbandage. Studien pågick i 12 veckor och därefter mättes förutom sårets storlek även vadens omfång för att studera eventuell ödemreduktion. Efter 12 veckor kunde man observera en markant minskning av både sårstorlek och vadmått hos alla nio patienter. Inga biverkningar kopplade till behandlingen hade rapporterades.

Studiens slutsats talar för att ett aktivt polstringsbandage bör integreras i behandlingen av venösa bensår.

Vårt sortiment av Mobiderm aktivt polstringsbandage hittar du på sida 5.



Den oregelbundna kubstrukturen applicerar en mängd tryckskillnader vilket stimulerar och aktiverar ödemreducering. Detta har visats i flera studier.

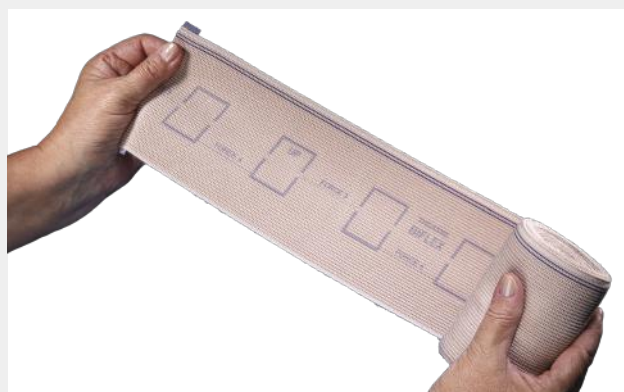

Biflex har ett integrerat kontrollsystem. När rektanglarna dras ut till liksidiga kuber har rätt kompression applicerats. Dessutom visar linjer var bandaget ska överlappa vid bandagering.



Biflex Light 16+
Produkt nr 160002



Biflex Light 16+ Pratic
– med ögla som underlättar bandageringen
Produkt nr 160003



Biflex Strong 17+
Produkt nr 170002



Biflex Strong 17+ Pratic
– med ögla som underlättar bandageringen
Produkt nr 170003

¹ Mobility - safety and efficacy of Mobiderm-bandage in the management of Lymphedema publicerad i *Lymphatic research and Biology* 2023

² Efficacy of Mobiderm® Bandage in Compression Therapy for Venous Ulcers: A Prospective Case Series publicerad i *The International Journal of Lower Extremity Wounds* 1-8

MOBIDERM STANDARD

Standardstorlekar för arm och hand

Våra standardprodukter för arm och hand är lika prisvärda som effektiva. De många storlekarna passar de allra flesta och vi garanterar mycket snabba leveranser.

Våra standardprodukter passar brukare med stabila och lätta till medelsvåra lymfödem. Eftersom armstrumpan är tillgänglig i hela 20 storlekar, varav 10 extra vida varianter, kan de allra flesta hitta en storlek som passar.


Den integrerade Mobidermstrukturen bearbetar effektivt lymfödemet under natten. Den genomtänkt ostrukturerade placeringen av kuberna skapar oregelbundna tryckskillnader vilket stimulerar och mobiliserar lymfsystemet.

Den avtagande kompressionen är ca 15 mmHg vid handleden vilket är fullt tillräckligt då det är funktionen från Mobidermstrukturen, inte kompressionen, som spelar roll. Denna lätta kompression är fullt tillräcklig och ger som bonus även en proprioceptiv effekt som kan upplevas smärtlindrande hos brukaren.

I sortimentet finns även en handske för höger eller vänster hand samt en handdel som passar både höger och vänster hand.

- **Handdelen utan fingrar** kan vändas ut och in och passar därför både höger och vänster hand.
- Armstrumpan finns i hela **20 olika standardstorlekar**, bland annat med extra vid passform.
- **Mycket prisvärda produkter** med **snabba leveranser** eftersom de alltid finns på lager.
- **Armstrumpan** har genomgående stora kuber medan **handsken** och **handdelen** har små kuber placerade vid handryggen.
- **Den patenterade strukturen** stimulerar och aktiverar lymfsystemet.

Utföranden

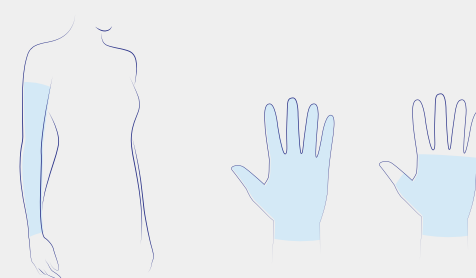

Art nr 373002
Armstrumpa

Art nr 373201
Handske

Art nr 373101
Handdel

Materialsammansättning:

Polyamid, elastan, polyester, polyuretanskum (15x15 mm), polytylenskum (5x5). Se etikett för detaljerad information.

- Tvättas i maskin 30 grader.
- 6 mån garanti.



På YouTube finns flera filmer om Mobiderm

Mobiderm Armstrumpa

	Omfångsmått		
	cC	cD	cG
1	14 - 16	22 - 25	25 - 29
2	16 - 18	25 - 28	29 - 33
3	18 - 20	28 - 31	32 - 36
4	20 - 22	31 - 34	35 - 39
5	22 - 24	34 - 37	38 - 42
ℓ G Normal längd	40 - 45		
ℓ G Lång längd	45 - 50		

Alla storlekar passar både höger och vänster arm.

Mobiderm Armstrumpa x-vid

	Omfångsmått		
	cC	cD	cG
1+	14 - 16	24 - 27	28 - 32
2+	16 - 18	27 - 30	31 - 35
3+	18 - 20	30 - 33	35 - 39
4+	20 - 22	33 - 36	38 - 42
5+	22 - 24	36 - 39	41 - 45
ℓ G Normal längd	40 - 45		
ℓ G Lång längd	45 - 50		

Alla storlekar passar både höger och vänster arm.

Mobiderm Handske

	Omfångsmått	
	cA	cC
1	14 - 16	22 - 25
2	14 - 16	24 - 27
3	16 - 18	25 - 28
4	16 - 18	27 - 30
5	18 - 20	28 - 31
6	18 - 20	30 - 33

Alla storlekar i vänster och höger utförande

Mobiderm Handdel

	Omfångsmått	
	cA	cC
1	14 - 16	22 - 25
2	14 - 16	24 - 27
3	16 - 18	25 - 28
4	16 - 18	27 - 30
5	18 - 20	28 - 31
6	18 - 20	30 - 33

Alla storlekar passar både höger och vänster hand.



Mobiderm Handdel
art nr 373101



Mobiderm Handske
art nr 373201



Mobiderm Armstrumpa
art nr 373002

MOBIDERM AUTOFIT

Justerbara standardstorlekar



Mobiderm Autofit är ett sortiment med justerbara produkter för arm och ben med integrerad Mobidermstruktur.

Med Mobiderm Autofit kan brukaren själv justera och anpassa passformen efter behov. Materialets ödemreducerande funktion är därmed alltid optimal, även när lymfödemet förändras i omfång. Markeringar på materialet visar hur mycket varje enskild kardborreflik bör dras åt för att uppnå optimal funktion.

Kubstrukturen i materialet är genomtänkt ostrukturerad och skapar oregelbundna tryckskillnader i ödemet. Stimuleringen aktiverar och mobiliserar lymfsystemet vilket även motverkar och mjukar upp fibrotisk vävnad. Studier visar att brukare som använder Mobiderm Autofit på natten i mycket högre grad motverkar återsvullnad jämfört med patienter som enbart använder medicinska kompressionsstrumpor på dagen.

Mobiderm Autofit är genomtänkt utformad med stora kuber i ben- och armdelen och små kuber i fot- och handdelen. På knä- och lårstrumpans underfot finns antihalknoppor om brukaren behöver gå upp under natten.

- Tvättas i maskin 30 grader.
- 6 mån garanti.

Materialsammansättning:

Polyamid, elastan, polyester. Kuber: polyuretanskum (15x15 mm), polytylenskum (5x5). Se etikett för detaljerad information.

- **NYHET!** Studie visar att Autofit kan användas även i **reduktionsfasen** som alternativ till bandagering, genom att applicera ett tryck motsvarande KKL2.
- **Enkel på- och avtagning** eftersom materialet försluts med kardborreband.
- **Tillåtande passform** eftersom de olika banden kan fästas olika hårt.
- **Precis och kontrollerad** fastsättning tack vare fästmarkeringarna i materialet.
- **Snabb leverans** då produkterna är i standardstorlek och alltid finns på lager.
- **Den patenterade strukturen** stimulerar och aktiverar lymfsystemet.

Utföranden



Art nr 373306
Armstrumpa med handdel



Art nr 373405
Knästrumpa



Art nr 373505
Lårstrumpa



På YouTube finns flera filmer om Mobiderm Autofit

Mobiderm Autofit Armstrumpa

	Omfångsmått (cm)			
	cA	cC	cD	cG
1	17 - 21	15 - 19	22 - 28	25 - 32
2	17 - 21	16 - 20	24 - 30	29 - 36
3	18 - 22	17 - 21	26 - 32	33 - 40
4	18 - 22	17 - 21	28 - 34	37 - 44
5	19 - 23	18 - 22	30 - 36	41 - 48
6	20 - 24	19 - 23	31 - 37	45 - 52
ℓ G Normal längd			40 - 45	
ℓ G Lång längd			45 - 50	

Mobiderm Autofit Knästrumpa

	Omfångsmått (cm)		
	cA	cC	cD
1	16 - 24	24 - 35	25 - 36
2	20 - 28	32 - 43	32 - 43
3	24 - 32	40 - 51	39 - 50
4	28 - 36	48 - 59	46 - 57
ℓ G Kort längd		38 - 40	
ℓ G Normal längd		40 - 42	
ℓ G Lång längd		42 - 44	
ℓ G Extra lång längd		44 - 46	

Mobiderm Autofit Lårstrumpa

	Omfångsmått (cm)		
	cA	cC	cG
1	16 - 24	24 - 35	46 - 57
2	20 - 28	32 - 43	53 - 65
3	24 - 32	40 - 51	61 - 72
4	28 - 36	48 - 59	68 - 80
ℓ G Kort längd		67 - 72	
ℓ G Normal längd		72 - 77	
ℓ G Lång längd		77 - 82	
ℓ G Extra lång längd		82 - 87	



Mobiderm Autofit lårstrumpa
art nr 373505



Mobiderm Autofit knästrumpa
art nr 373405



Mobiderm Autofit armstrumpa
art nr 373306

MOBIDERM INTIMATE SHORTS

Mobiliserar ödem i genitaleområdet



Med Mobiderm Intimate Shorts erbjuder vi äntligen en specifikt utvecklad produkt för patienter med genitala lymfödem.

Mobiderm Intimate Shorts har utvecklats tillsammans med vårdpersonal och brukare för att möta alla tänkbara krav och önskemål. Resultatet är en produkt med en löstagbar pelott med Mobidermstruktur i en diskret design.

Kompressionen i materialet är väl genomtänkt med ett graderat tryck motsvarande 15-20 mmHg runt bäckenområdet där även pelotten är placerad. Vid benens avslut är kompressionen endast ca 5 mmHg vilket gör att shortsens fördel även kan kombineras med överlappande medicinska kompressionsstrumpor. Eftersom det är funktionen från Mobidermstrukturen som aktiverar lymftransporten är kompressionsgraden fullt tillräcklig.

Mobiderm Intimate Shorts har pelotter med Mobidermstruktur som kan tas ur och tvättas separat. Dessa pads är annorlunda utformade för kvinnor och män eftersom deras behov ser annorlunda ut.

Tillsammans med tre behandlingscentrum i Frankrike har vi även genomfört en medicinsk studie med Mobiderm Intimate Shorts. Studien visar att ca 80% av användarna fick bättre resultat. Studien publiceras under 2023 men resultaten har redan presenterats vid 46th European Society of Lymphology-kongressen, 2022. Assisi, Italien, se sid 18.

- **Färdig lösning** för kvinnor och män med ödem i genitalområdet.
- **Mycket prisvärda produkter** med **snabba leveranser** eftersom de alltid finns på lager.
- **Kan kombineras med lårstrumpor** för behandling av hela benen.
- **Särskilt utformade pelotter** med Mobidermstruktur med olika design för kvinnor och män.
- **Används dag och natt** beroende på behov.
- **Den patenterade strukturen** stimulerar och aktiverar lymfsystemet.
- **Separata pelotter** kommer att kunna beställas under andra halvan av 2023.

Art nr 373601

Mobiderm Intimate Shorts för kvinnor

Art nr 373701

Mobiderm Intimate Shorts för män

Materialsammansättning:

Polyamid, elastan, polyester, polyuretanskum. Se etikett för detaljerad information.

- **Tvättas i maskin 40 grader.**
- **6 mån garanti.**



På YouTube finns instruktioner för påtagning av Mobiderm Intimate Shorts

Mobiderm Intimate Shorts

	Omfångsmått		
	cG	cH	
1	45 - 54	88 - 94	cG = låromfång cH = omfång över stussen
2	48 - 58	95 - 101	
3	51 - 62	102 - 108	
4	54 - 66	109 - 115	
5	57 - 69	116 - 122	
6	60 - 72	123 - 129	


Alla storlekar finns i dam- och herrmodell.



Mobiderm Intimate Shorts för kvinnor



Pelott för kvinnor

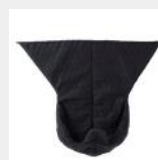

Skålförmad pelott för män



Mobiderm Intimate Shorts för män



MOBIDERM INTIMATE BRA

Kompressions-BH som mobiliserar och reducerar postoperativa och kroniska ödem i bröstområdet

Mobiderm Intimate BH är en optimal behandlingslösning för kvinnor som har bröst-relaterade ödem.

2-3 av 10 kvinnor riskerar att utveckla lymfödem till följd av strålning eller kirurgiska ingrepp i samband med bröstcancer. Oavsett om det rör sig om ablation eller bröstkonserveringsterapi (BET) kan ödem uppstå akut post-operativt eller manifestera sig långt senare som kroniskt lymfödem i bröst och/eller bröstkorg.

Studier uppskattar att fler än 1,5 miljoner patienter över hela världen har drabbats av bröstcancerrelaterade ödem.

Mobiderm Intimate Bra är en kompressions-BH som är särskilt utvecklad för postoperativt bruk, dels i den akuta fasen efter behandling av bröstcancer samt vid långvarig behandling av kroniska lymfödem.

Mobiderm Intimate Bra har en effektivt kompressiv funktion som tillsammans med den integrerade pelotten med Mobidermstruktur dränerar och bearbetar ödemet samt minimerar risken för hematom.

Mobiderm Intimate Bra är genomtänkt utformad med breda och mjuka axelband, högt skuren under armarna och väl integrerade sömmar som inte skaver. De två medföljande pelotterna med Mobidermstruktur kan tas ur och tvättas separat.

• **Unik produkt** för kvinnor med bröst- och bröstkorgsrelaterad ödemproblematik.

• **Integrerade fickor** för externa bröstproteser

• **Urtagbara pelotter** med **Mobidermstruktur**.

• Pelotterna kan beställas **separat**.

• **Perfekt avvägd kompression** i kombination med Mobidermstrukturen mobiliserar och reducerar ödemet.

• **Justerbara axelband** med hakar och hyskor i tre rader på samtliga storlekar.

• **Breda vadderade axelband** säkerställer att cirkulationsförmågan inte påverkas.

• **Platta och mjuka sömmar** som inte skaver ger ökad komfort vid långvarigt bruk.

• **Dragkedja fram** gör Mobiderm Intimate BH lätt att ta på och av.

Art nr T571301

Mobiderm Intimate Bra

Materialsammansättning:

Polyamid, elastan, polyester, polyuretanskum. Se etikett för detaljerad information.

• **Tvättas i maskin 30 grader.**

• **6 mån garanti.**



På YouTube finns instruktioner för påtagning av Mobiderm Intimate Bra

Mobiderm Intimate Bra

Välj storlek enligt omfånget under bysten (cm)					
	68-77 cm	78-87 cm	88-97 cm	98-107 cm	108-117 cm
BH-storlek	70-75	80-85	80-95	100-105	110-115
	XS	S	M	L	XL
Välj kupa genom att mäta omfånget runt bysten (cm)					
AA / A	80-89	90-99	100-109	112-119	120-129
B / C	84-93	94-103	104-113	116-123	124-133
D / E	88-97	98-107	108-117	120-127	128-137

Separata pelotter



Två pelotter med Mobidermstruktur medföljer. Dessa kan beställas separat.

Art nr T5713512, 5 storlekar (XS-XL)



**Mobiderm Intimate Bra
framifrån**



**Mobiderm Intimate Bra
bakifrån**

MOBIDERM MTM

Individuellt måttillverkade produkter

Individuellt måttillverkade produkter är perfekta vid svårare former av lymfödem som kräver exakt passform för bästa möjliga behandlingsresultat.


Även om våra standardprodukter passar de allra flesta så krävs det ibland en skräddarsydd lösning. Med vårt sortiment av måttillverkade utföranden kan vi erbjuda en individuell lösning till både barn och vuxna med omfångsmått som inte riktigt passar in på en standardstorlek.

Måttillverkade utföranden är även att föredra vid svårare stadier av lymfödem med områden av fibrotisk vävnad, samt då armen eller benets anatomiska form helt enkelt inte lämpar sig för en standardstorlek.

För enklare på- och avtagning finns även möjlighet att integrera en öppning med kardborrestängning. Har du andra önskemål? Kontakta oss!

- **Leverans inom 10 arbetsdagar** trots att varje produkt består av många olika komponenter som alla anpassas och kombineras enligt brukarens mått.
- Vi använder **samma mätpunkter** som du redan är van vid från förskrivning av andra medicinska kompressionsstrumpor.
- **Välj mellan Mobiderm-struktur** med små eller stora kuber i hela benet eller små i fotdelen och stora i bendelen.
- **Instruktionsfilmer för måttagning** finns på vår YouTube-kanal.
- **I vår e-shop** kan du göra reorder, reorder med ändringar eller beställa produkter med nya mått, givetvis med full historik.
- **Den patenterade strukturen** stimulerar och aktiverar lymfsystemet.

Utföranden

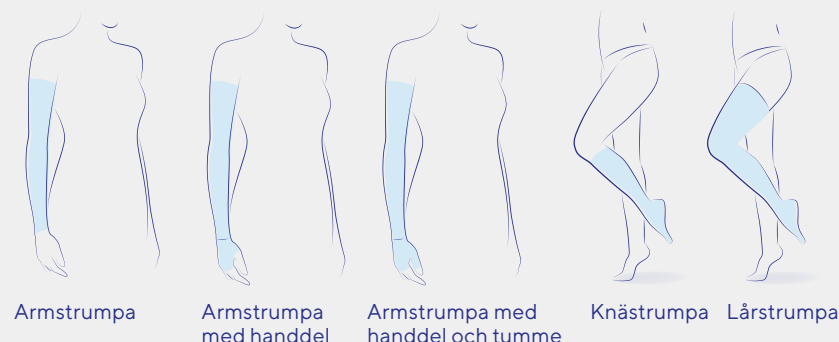

- **Tvättas i maskin 30 grader.**
- **6 mån garanti.**



På YouTube finns filmer som visar korrekt måttagning av både arm- och benstrumpor.

För knä- och lårstrumpan kan du välja:

- Stora kuber i benet och små i fotdelen
- Endast stora kuber i både ben- och fotdel
- Endast små kuber i både ben- och fotdel

Orderblanketter
för MTM finns på
www.thuasne.se

Materialsammansättning:

Polyamid, elastan, polyester, polyuretanskum (15x15 mm), polytylenskum (5x5). Se etikett för detaljerad information.





MOBIDERM

Bevisat medicinskt effektiv i flera studier

Mobiderm har deltagit i flera medicinska studier. Resultaten är mycket positiva och det råder ingen tvekan om att Mobiderm är ett effektivt verktyg för att behandla lymfödem.

- Mobiderm **motverkar återsvullnad** efter reduktionsfasen.
- Mobiderm Autofit **stabiliserar och kontrollerar** lymfödemet under underhållsfasen.
- Hos patienter som nyligen diagnosticerats med lymfödem visar studien **tydlig volymreduering**.
- Användning av Mobiderm under natten kan **reducera ödemets volym**, ha en **smärtlindrande verkan** och ger en proprioceptiv effekt som har en **lugnande inverkan**.
- Om Mobiderm används tillsammans med kompressionspump uppnås bättre resultat trots **lägre tryck under kortare tid**.

Mestre	Exploratory study to evaluate the clinical benefits of wearing the Mobiderm Intimate Shorts in patients with pelvic and/or genital lymphedema 46th European Society of Lymphology Congress – June 16-17-18 2022. Assisi, Italy.	2022
Dahr	Mobility - safety and efficacy of Mobiderm-bandage in the management of Lymphedema	2022
Todd	Mobiderm Autofit : an adjustable sleeve that enables patients to self-manage LO	2018
Toccafondi	Clinical use of a night-time Mobiderm garment as a treatment modality for breast cancer related LO	2017
Tchórzewska	The use of ipc with mobiderm in upper limb lymphoedema treatment	2017
Mestre	Mobiderm Autofit night-time compression sleeve in maintenance phase of upper limb LO: the MARILYN pilot RCT	2017
Whitaker	Lymphoedema management at night: views from patients across 5 countries	2016
Quéré	Prospective multicenter observational study of LO therapy: POLIT study	2014





Vi har samlat 13 studier om Mobiderm och ödem-drivande produkter för användning under natten i en broschyr. Kontakta oss för mer information!



BILFEX SELF ADJUST

Justerbar kompression för arm och ben.

Biflex Self Adjust är ett helt nytt sortiment med justerbara kompressionswraps – med en särskilt smart funktion!

Justerbar kompression är ett smidigt och enkelt alternativ till bandagering. Eftersom produkterna är justerbara kan de anpassas i takt med att ödemet förändras, och på så vis ge korrekt kompression under hela behandlingen.

Biflex Self Adjust lämpar sig utmärkt för behandling av ödem (venösa ödem, lymfödem samt vid akuta ödem) och kronisk venös insufficiens.


För att veta vilken kompression som applicerats har vi integrerat en smart guide i vad- och lårdelen. Vi kallar det **Pressure Adjust** och den visar exakt hur hårt du ska dra åt kardborreremmarna.

Pressure Adjust är ett integrerat system som används för att applicera korrekt kompressionsnivå på lår- och vaddelen. Guiden visar 3 nivåer:

20 mmHg = Ljusblått streck
30 mmHg = Blått streck
40 mmHg = Mörkblått streck



Armdel
art nr 183501

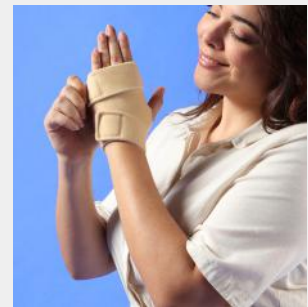

Handdel
art nr 181501



Vaddel
art nr 183001



Fotdel
art nr 181001



Knädel
art nr 182001



Lårdel
art nr 182501

Armdel

	cC	cD	cG
1	15 - 19	22 - 28	25 - 32
2	16 - 20	24 - 30	29 - 36
3	17 - 21	26 - 32	33 - 40
4	17 - 21	28 - 34	37 - 44
5	18 - 22	30 - 36	41 - 48
6	19 - 23	31 - 37	45 - 52

Handdel

	cA
1	14 - 19
2	19 - 24
3	24 - 29

Vaddel

	cB	cC	cD
1	16 - 24	24 - 35	25 - 36
2	20 - 28	32 - 43	32 - 43
3	24 - 32	40 - 51	39 - 50
4	28 - 36	48 - 59	46 - 57
/ B-D Normal			< 36
/ B-D Lång			> 36

Lårdel


	cE	cG
1	34 - 45	46 - 57
2	41 - 53	53 - 65
3	49 - 60	61 - 72
4	56 - 68	68 - 80
/ E-G Normal		< 36
/ E-G Lång		> 36

Knädel


	cE
1	35 - 50
2	50 - 65
3	65 - 85

Fotdel


	cB	cH
1	< 36	19 - 24
2	< 36	24 - 29
3	< 41	29 - 34

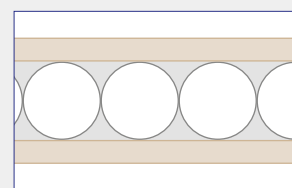

Öppna celler säkerställer god andningsförmåga.

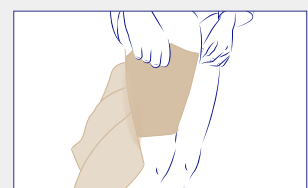

Integrerad tub förenklar påtagning.

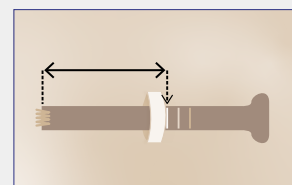

Integrerad guide visar korrekt kompressionsnivå.



Överlappande design motverkar fönsterödem.

CICATREX CONTOUR

Kompressionsplagg för användning efter estetisk kirurgi eller vid lipödem.

Cicatrex Contour har en följsam varp-stickning i ett allergivänligt material som formar sig efter anatomin och ger behaglig komfort hela dagen

Cicatrex Contour ger stöd och komfort efter estetisk kirurgi, exempelvis fettsugning, för både män och kvinnor. Det högelastiska kompressiva materialet (KKL2) bidrar till att minimera ärrvärvad samt genom att jämna ut eventuella ojämnheter i huden efter ingreppet.

Samtidigt minimeras risken för bestående ärrvävnad eftersom kompressionen imiterar hudens naturliga mottryck, vilket har en lugnande verkan på produktionen av hudceller. Kompressionen bidrar även till att de nya kollagenfibrerna riktas parallellt, istället för att klumpa ihop sig och bilda hypertrofisk ärrvävnad.

Cicatrex Contour lämpar sig också utmärkt vid lipödem. Dels ökar både den venösa och lymfatiska cirkulationen vilket minskar risken för inflammation, samtidigt som syresättningen i vävnaden förbättras men har framför allt en smärtlindrande effekt.



Leggings
art nr 348201



Leggings med hög midja
art nr 348301



Trosgördel
art nr 348101



Dragkedja samt hakar och hyskor förenklar på- och avtagning.

Storlek	cT runt midjan	Runt rumpan	cG runt lår
X-Small	61 - 66 cm	86 - 91 cm	48 - 51 cm
Small	66 - 71 cm	91 - 97 cm	51 - 54 cm
Medium	71 - 76 cm	97 - 102 cm	54 - 57 cm
Large	76 - 81 cm	102 - 107 cm	57 - 60 cm
X-Large	81 - 89 cm	107 - 114 cm	60 - 65 cm
XX-Large	89 - 99 cm	114 - 124 cm	65 - 70 cm
3X-Large	99 - 109 cm	124 - 135 cm	70 - 77 cm
4X-Large	109 - 119 cm	135 - 145 cm	77 - 86 cm

SILIMA® CARE CONCEPT

**Vi tänker på dig
genom hela vård-
kedjan.**

1

EFFEKTIV MINIMERING AV ÄRRVÄVNAD

CICATREX® är ett precisionstillverkat måttsytt kompressionsmaterial.

CICATREX® är en särskild typ av kompressionsmaterial för post-operativ användning i syfte att minimera ärrvävnad, exempelvis efter kirurgiskt ingrepp. Materialets egenskaper och kompression härmar hudens naturliga mottryck vilket effektivt minimerar hypertrofisk ärrvävnad.

CICATREX® finns i flera kvaliteter, både i vävda och flatstickade varianter, och kan måttillverkas exakt efter dina önskemål och krav. Vi erbjuder även ett mindre sortiment av standardstorlekar.

Vill du veta mer? Kontakta gärna en av våra produktspecialister.



2

ÅTERSKAPAR EN NATURLIG KONTUR

SILIMA® är ett komplett sortiment av externa bröstproteser av mycket hög kvalitet

SILIMA® bröstproteser har en skön och naturlig känsla som ger kvinnor som genomgått bröstkirurgi en bättre livskvalitet. Vi erbjuder ett brett urval av storlekar och modeller så att alla kvinnor kan hitta en perfekt individuell lösning som både känns naturlig och ser naturlig ut.

SILIMA® tillverkas sedan 50 år vid vårt produktionscenter i Tyskland. Vi har full kontroll över hela produktionskedjan och kan säkerställa att enbart skonsamma material användas.

Vill du veta mer? Kontakta gärna en av våra produktspecialister.

3

HÅLLER ÖDEM UNDER KONTROLL

MOBIDERM® håller lymfödemet under kontroll och bidrar till en effektiv ödemreduktion.

Hemligheten bakom MOBIDERM® är den kubformade strukturen som masserar, stimulerar och aktiverar lymfsystemet från flera håll. Lymfvätska som ansamlats i vävnaden aktiveras och mobiliseras vilket leder till en snabbare reduktion av svullnaden.

MOBIDERM® har deltagit i flera studier och har bevisad effekt, dels i den initiala reduktionsfasen i kombination med bandagering och dels i underhållsfasen som komplement till flatstickade medicinska kompressionsstrumpor för användning på dagen.

Vill du veta mer? Kontakta gärna en av våra produktspecialister.



Vill du veta mer?

Kontakta oss så skickar vi en katalog med mer information om Cicatrex och Silima. Våra kontaktuppgifter hittar du på sista sidan.

WINGS FOR YOUR HEALTH

THUASNE SCANDINAVIA AB

Box 95
131 07 Nacka
Tel 08 - 618 74 50
Email : info@thuasne.se
www.thuasne.se

THUASNE REHABBUTIKEN AB

Ringvägen 88
118 60 Stockholm
Tel 08 - 644 60 17
Email : butik@thuasne.se
rehabbutiken.thuasne.se



THUASNE

120 rue Marius Auphan
92300 Levallois-Perret Cedex - France

All the medical devices mentioned on this document are CE marked according to the European council directive 93/42/EEC and its relatives or the Regulation 2017/745 on medical devices, unless specifically identified as "NOT CE MARKED". Products mentioned in this document are CE class I devices. Please contact Thuasne should you need any additional information on devices classification. Please read carefully the instructions for use, indications and contraindications of the product. We reserve the right to modify our products as shown and described in this catalogue, without previous notice. Non-contractual photographs.

Last revision date: (2023-03). Photo credits: Thierry Maltz, Studio Caterin, ©Studio Caterin, ©Shutterstock/Krakenimages/pixelheadphoto digitalskillet/m image photography/ Roman Samborski/ Kate Kom

www.thuasne.se

