

# Thérapie par ondes de choc



Exclusif à OrthoCanada



# Thérapie par ondes de choc radiales

## Appareil à ondes de choc BTL-6000 ÉLITE

Offrant l'appareil à ondes de choc radiales le plus puissant du marché avec une intensité allant jusqu'à 6 bars et un applicateur intelligent *Magnum* ultraléger, l'appareil à ondes de choc BTL-6000 Elite est une solution clinique qui permet de traiter toutes les affections musculo-tendineuses subaiguës et chroniques.

L'intensité de 6 bars permet de traiter avec succès les tissus plus profonds, tandis que l'applicateur intelligent *Magnum* ultraléger permet d'ajuster les paramètres facilement. MDALL 106498

- Écran tactile en couleur de 8,4"
- 22 protocoles prédéfinis
- Comprend l'applicateur intelligent *Magnum*
- Intensité jusqu'à 6 bars
- Fréquence jusqu'à 22 Hz



BTL-RSWT-ELITE Appareil à ondes de choc BTL-6000 ÉLITE

Appareil à ondes de choc BTL-6000 ÉLITE

### Mécanisme d'action

L'onde de choc radiale est une onde acoustique qui transporte une énergie élevée vers le tissu myosquelettique et provoque une stimulation mécanique qui favorise la régénération et la réparation des tissus dans les tendons et autres tissus mous blessés. C'est le traitement de premier choix dans les affections chroniques telles que les tendinopathies, les calcifications et les douleurs persistantes des muscles et des tendons.



### Shockwave Training Canada

Formations sur la thérapie par onde de choc. Pour le calendrier de nos formations continues, visiter [www.shockwavetraining.ca](http://www.shockwavetraining.ca)



# L'applicateur intelligent *Magnum*

Tourner pour affiner les paramètres de la thérapie

6 Bars et 22 Hz

Un coussin amortisseur élimine les chocs inverses

Indicateur intelligent des paramètres de la thérapie

Ultraléger et ergonomique

Projectile repensé pour une durée de vie plus longue



## BTL-6000 PRO

- Écran tactile couleur de 5,7"
- 22 protocoles prédéfinis
- Comprend l'applicateur *Magnum*
- Intensité jusqu'à 4 bars
- Fréquence jusqu'à 15 Hz



## BTL-6000 EASY

- Interface LED conviviale
- 7 protocoles prédéfinis
- Intensité jusqu'à 4 bars
- Fréquence jusqu'à 15 Hz

## Indications courantes



Tendinite rotulienne



Tendinite, bursite et calcification



Épicondylite latérale



Relâchement des points gâchettes



Entorse des ischio-jambiers



# Thérapie par ondes de choc focalisées BTL-6000

L'appareil à ondes de choc focalisées BTL-6000 est une alternative non invasive à la chirurgie dont les effets ont été cliniquement prouvés. Idéale pour rapidement soulager la douleur et restaurer la mobilité, la thérapie améliore la régénération des tissus, élimine les calcifications, détend les muscles et les points gâchettes, et stimule la guérison des fractures non consolidées. Sa technologie offre la durée de vie la plus élevée avec une intensité de choc constante et un équilibre parfait entre une densité de flux énergétique élevée et une taille de zone focale optimale. L'appareil possède la gamme de fréquences la plus élevée du marché pour un large ensemble d'indications. MDALL 102793

BTL-FSWT

Appareil à ondes de choc focalisées BTL-6000



Ondes de choc focalisées  
BTL-6000 avec chariot

## Effets thérapeutiques

Les ondes acoustiques à pic d'énergie élevé utilisées dans la thérapie par ondes de choc interagissent avec les tissus, provoquant des effets médicaux bénéfiques - accélération de la réparation des tissus et de la croissance cellulaire, analgésie et restauration de la mobilité. Chacun de ces effets se produit simultanément et est utilisé pour traiter les affections chroniques, subaiguës et aiguës (utilisateurs avancés uniquement).

- Formation de nouveaux vaisseaux sanguins
- Élimination de l'inflammation chronique
- Stimulation de la production de collagène
- Dissolution des fibroblastes calcifiés
- Dispersion de la substance P, médiatrice de la douleur
- Relâchement des points gâchettes

## Indications courantes



Tendinite et bursite



Fracture non consolidée



Calcification



Relâchement des points gâchettes



Nécrose vasculaire



## Les fonctions les plus avancées de l'industrie

Technologie  
électroacoustique  
brevetée offrant une  
durée de vie de 3  
millions de chocs

Applicateur  
intelligent avec contrôle  
continu du choc


Réglage des paramètres  
directement à partir de  
l'écran tactile

Entretien  
facile et circuit  
sans liquide

Service de  
remplacement rapide  
de l'applicateur



## Sélectionner la profondeur de pénétration jusqu'à 65 mm avec 3 coussinets de raccord différents

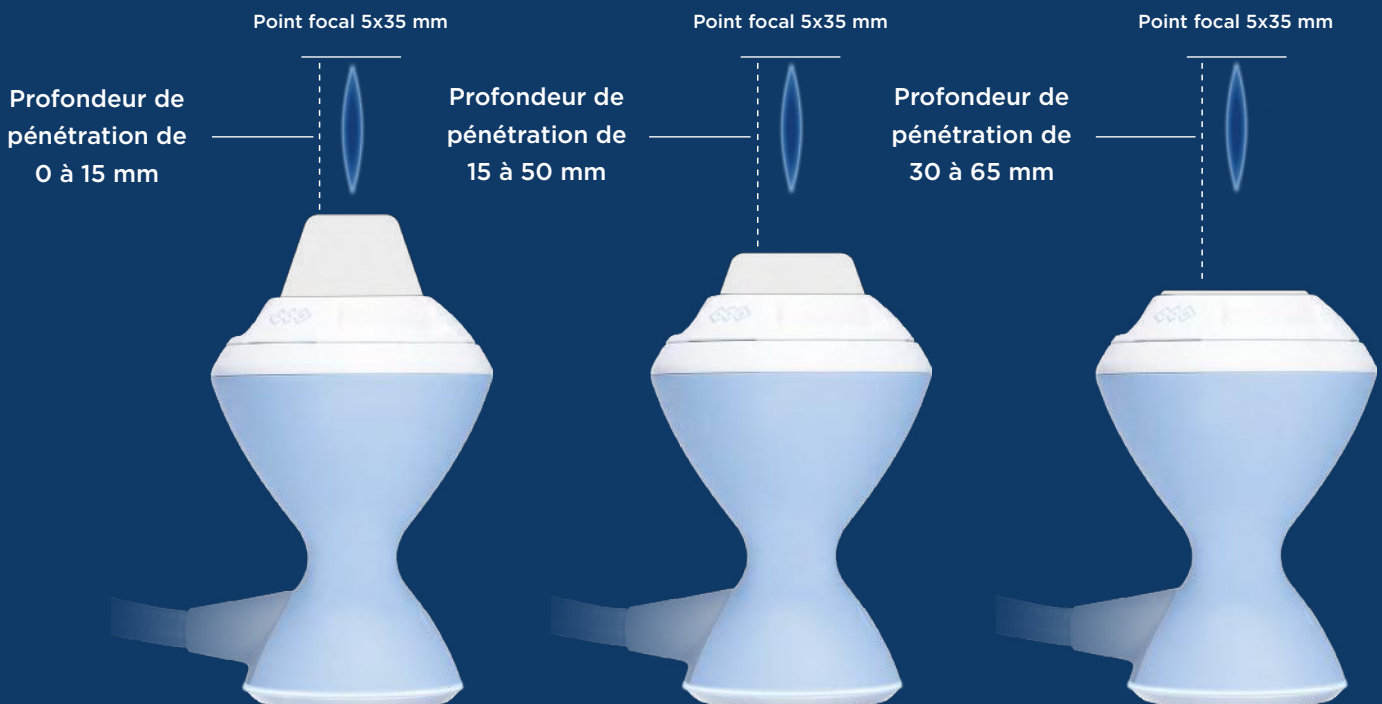



**ORTHOCANADA**



## Votre conseiller en vente d'OrthoCanada

Razi Khaddage

[razi.khaddage@orthocanada.com](mailto:razi.khaddage@orthocanada.com)

1-800-561-0310 ext 1704



[www.OrthoCanada.com](http://www.OrthoCanada.com) | 1-800-561-0310