



Catálogo Centroamérica y Caribe

Dispositivos de Acceso Vascular

Índice

● Introducción.....	3
● Algoritmo para la selección del dispositivo de acceso vascular.....	4
Catéteres periféricos cortos	
● BD Insyte™.....	5
Catéteres periféricos cortos de seguridad	
● BD Insyte™ Autoguard™.....	6
Catéteres periféricos de seguridad integrados	
● BD Nexiva™.....	7
Catéteres de línea media	
● PowerGlide Pro™.....	8
● Provena™ Midlines.....	9
Catéteres Centrales de Inserción Periférica	
● PowerPICC™.....	10
● PowerPICC™ Sherlock 3CG™ TCS.....	11
Catéteres de hemodiálisis aguda	
● Niagara™.....	13
● Niagara Slim Cath™.....	13
Agujas huber para puerto implantable	
● PowerLoc™.....	15
● SafeStep™.....	16
Tecnologías para el Acceso Vascular	
● Ultrasonido vascular Site-Rite™ 8.....	18
● Sensor Sherlock 3CG+™.....	18
● Kits de guías de aguja y cubiertas de sonda.....	19

Introducción

¿Qué es la terapia de infusión o terapia intravascular?

La terapia de infusión se refiere a cualquier medicamento administrado a los pacientes por vía intravenosa a través de un dispositivo denominado de acceso vascular o catéter intravenoso.

Se pueden administrar varios tipos de medicamentos mediante terapia de infusión que incluyen:

- Quimioterapia
- Antibióticos
- Nutrientes
- Entre otros

Hasta el 90% de todos los pacientes ingresados en un hospital reciben o requieren de un dispositivo de acceso vascular.*

La INS (Infusion Nursing Society) recomienda utilizar el catéter menos invasivo y que no abarque más del 40% de la luz de la vena en la terapia de infusión.^a



BD Instaflash™

Tecnología que incorpora una aguja con una muesca que confirma el retorno venoso y el ingreso inmediato al vaso en el punto de inserción.^b



BD Vialon™

Biomaterial termosensible que se suaviza hasta en un 70% mientras está dentro del vaso, permite una inserción más sencilla y se adapta a la forma de la vena. Los catéteres fabricados con biomaterial BD Vialon™ reducen la posibilidad de irritación de la pared del vaso, lo que a su vez reduce la incidencia de flebitis mecánica, una complicación importante de la terapia intravenosa.^a

Límite de presión máxima-PSI

Libras por pulgada cuadrada (pound per square inch) unidad para medir la presión.



Volumen de cebado

Cantidad de líquido requerido para llenar y eliminar el aire de un circuito extracorpóreo o un dispositivo médico antes de su uso.

a. Data on file.

b. The Complete Family of BD IV Catheters and Devices. Disponible en: <https://www.activeforever.com/pdf/bdcatheters-and-devices-portfolio.pdf>
Consultado: abril 22, 2021.

Algoritmo para la selección del dispositivo de acceso vascular


Esta tabla es sólo para fines informativos y no pretende reemplazar los estándares actuales de atención o protocolos institucionales.

- Duración de la terapia.
- Número de lúmenes requeridos.
- Tasas de flujo requeridas.
- Necesidad de toma de muestra.
- Preferencia del paciente, capacidad. de hacerse cargo del dispositivo y cuidarlo.

DETERMINAR pH / OSMOLALIDAD

Considerar

- Riesgo de complicaciones en la colocación.
- Riesgo de complicaciones post colocación.
- Posibilidad de cambio en la terapia.
- Nivel actual y potencial de actividad del paciente.
- Historial médico.
- Costos: dispositivo/inserción/mantenimiento.
- Condición médica actual.

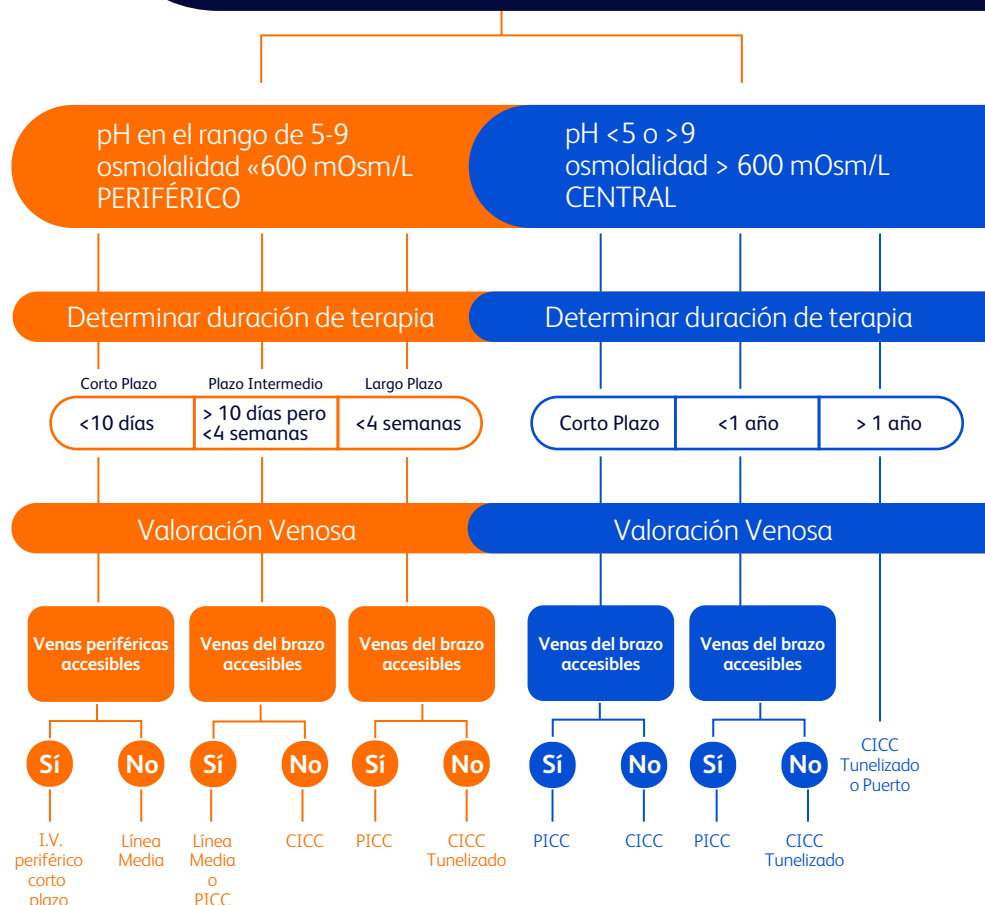


BD Insyte™

Catéter periférico corto convencional elaborado con poliuretano radiopaco denominado **BD Vialon™**.

Catálogo	Descripción	Tasa de flujo de gravedad (mL/min)	Diámetro Interior (mm)	Diámetro Exterior (mm)	Unidad mínima de venta	Empaque secundario
 381267	14 GA x 1.75 in	330	1.74	2.15	Caja con 200 pzas	Caja con 50 unidades
 381254	16 GA x 1.16 in	220	1.36	1.74	Caja con 200 pzas	Caja con 50 unidades
 381257	16 GA x 1.77 in	205	1.36	1.74	Caja con 200 pzas	Caja con 50 unidades
 381244	18 GA x 1.16 in	105	0.98	1.31	Caja con 200 pzas	Caja con 50 unidades
 381234	20 GA x 1.16 in	60	0.8	1.09	Caja con 200 pzas	Caja con 50 unidades
 381223	22 GA x 1.00 in	35	0.65	0.88	Caja con 200 pzas	Caja con 50 unidades
 381212	24 GA x 0.75 in	25	0.52	0.7	Caja con 200 pzas	Caja con 50 unidades
 381211	24 GA x 0.56 in	25	0.52	0.7	Caja con 200 pzas	Caja con 50 unidades

BD Insyte™ Winged

Catálogo	Descripción	Tasa de flujo de gravedad (mL/min)	Diámetro Interior (mm)	Diámetro Exterior (mm)	Unidad mínima de venta	Empaque secundario
 381344	18 GA x 1.16 in	105	0.98	1.31	Caja con 200 pzas	Caja con 50 unidades
 381334	20 GA x 1.16 in	60	0.8	1.09	Caja con 200 pzas	Caja con 50 unidades
 381323	22 GA x 1.0 in	35	0.65	0.88	Caja con 200 pzas	Caja con 50 unidades
 381312	22 GA x 1.0 in	25	0.52	0.7	Caja con 200 pzas	Caja con 50 unidades

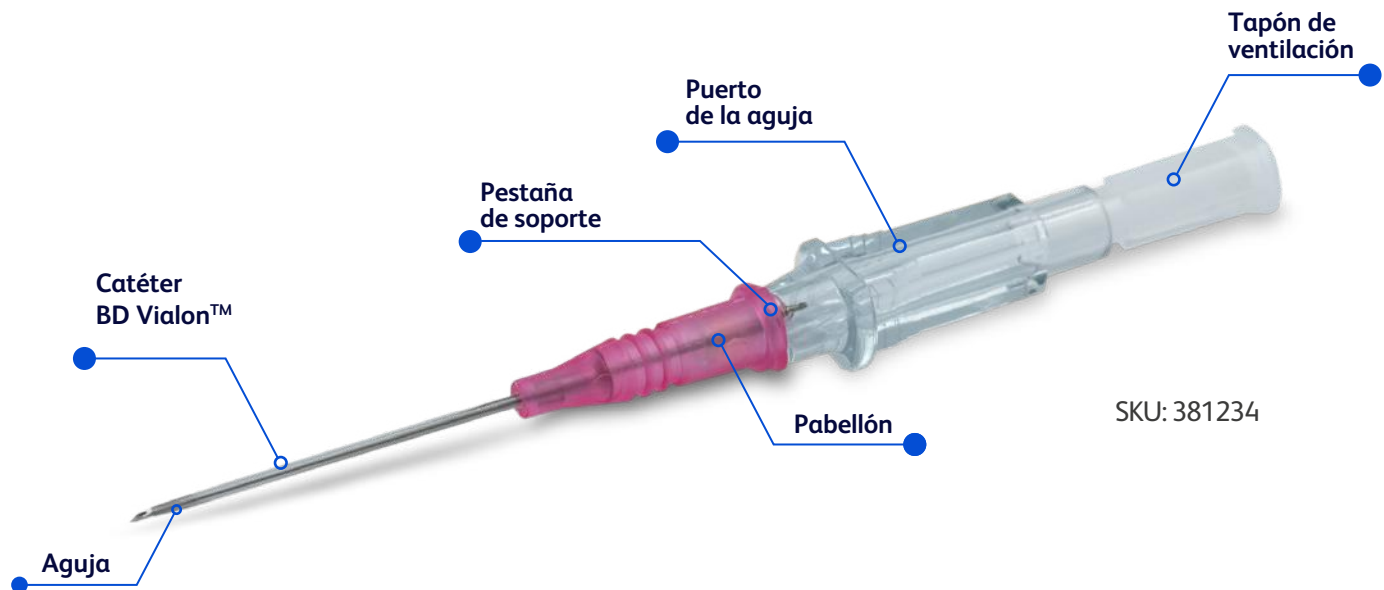

Escaneé el siguiente código para visualizar BD Insyte™ en realidad aumentada.




Favor de revisar y confirmar la disponibilidad de nuestros productos en su región con su ejecutivo de ventas de BD.

BD Insyte™ Autoguard™

Catéter periférico corto de seguridad activa elaborado con poliuretano radiopaco denominado **BD Vialon™** que incluye un botón que retrae instantáneamente la aguja y con tecnología **BD Instaflash™**.

Catálogo	Descripción	Tasa de flujo de gravedad (mL/min)	Diámetro Interior (mm)	Diámetro Exterior (mm)	Unidad mínima de venta	Empaque secundario
 381867	14 GA x 1.75 in	330	1.74	2.146	Caja con 200 pzas	Caja con 50 unidades
 381857	16 GA x 1.77 in	205	1.359	1.74	Caja con 200 pzas	Caja con 50 unidades
 381844	18 GA x 1.16 in	105	0.978	1.308	Caja con 200 pzas	Caja con 50 unidades
 381834	20 GA x 1.16 in	60	0.8	1.08	Caja con 200 pzas	Caja con 50 unidades
 381823	22 GA x 1.0 in	35	0.648	0.876	Caja con 200 pzas	Caja con 50 unidades
 381812	24 GA x 0.75 in	20	0.521	0.699	Caja con 200 pzas	Caja con 50 unidades
 381811	24 GA x 0.56 in	20	0.521	0.699	Caja con 200 pzas	Caja con 50 unidades

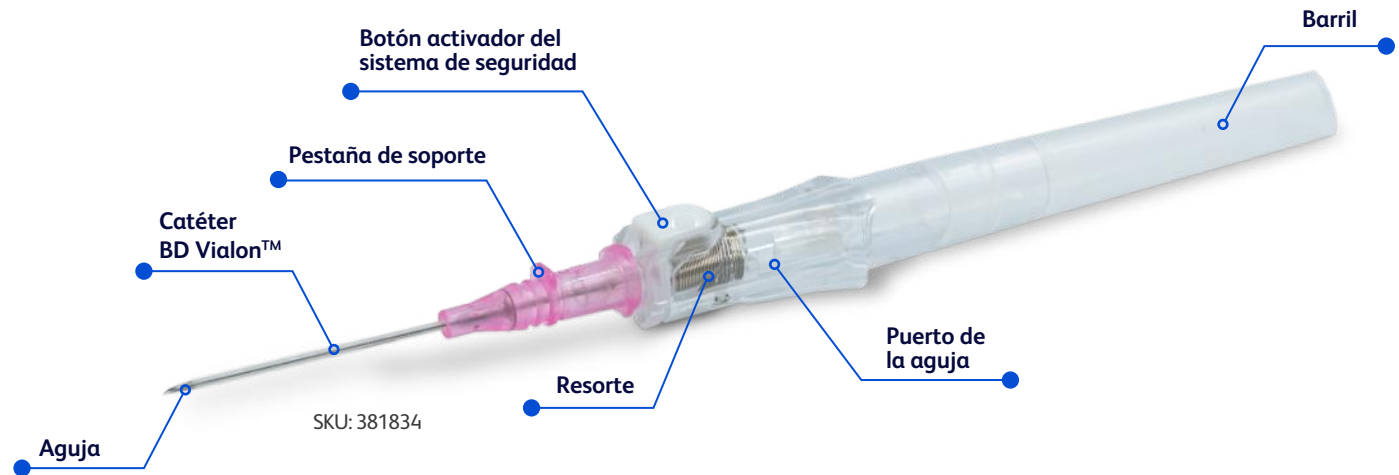

Escaneé el siguiente código para visualizar BD Insyte™ Autoguard™ en realidad aumentada.




Favor de revisar y confirmar la disponibilidad de nuestros productos en su región con su ejecutivo de ventas de BD.

BD Nexiva™

Catéter periférico corto de seguridad integrado de uno o dos puertos (catéter + extensión + conectores libres de aguja BD Qsyte™ para la versión de dos puertos), fabricado con poliuretano radiopaco denominado **BD Vialon™** cuenta con **sistema de seguridad pasiva**, que guarda la aguja al momento de retirar el catéter y tecnología **BD Instaflash™**.

BD Nexiva™ Un puerto

Catálogo	Descripción	Tasa de flujo de gravedad (mL/min)	Extensión del tubo (mm)	Diámetro Exterior (mm)	Diámetro Interior (mm)	Unidad mínima de venta	Empaque secundario
 383519	18 GA x 1.25 in	84	1.65	1.31	0.98	Caja con 80 pzas	Caja con 20 unidades
 383517	20 GA x 1.25 in	58	1.65	1.10	0.83	Caja con 80 pzas	Caja con 20 unidades
 383512	22 GA x 1.00 in	33	1.22	0.90	0.67	Caja con 80 pzas	Caja con 20 unidades
 383511	24 GA x 0.75 in	18	1.22	0.71	0.53	Caja con 80 pzas	Caja con 20 unidades

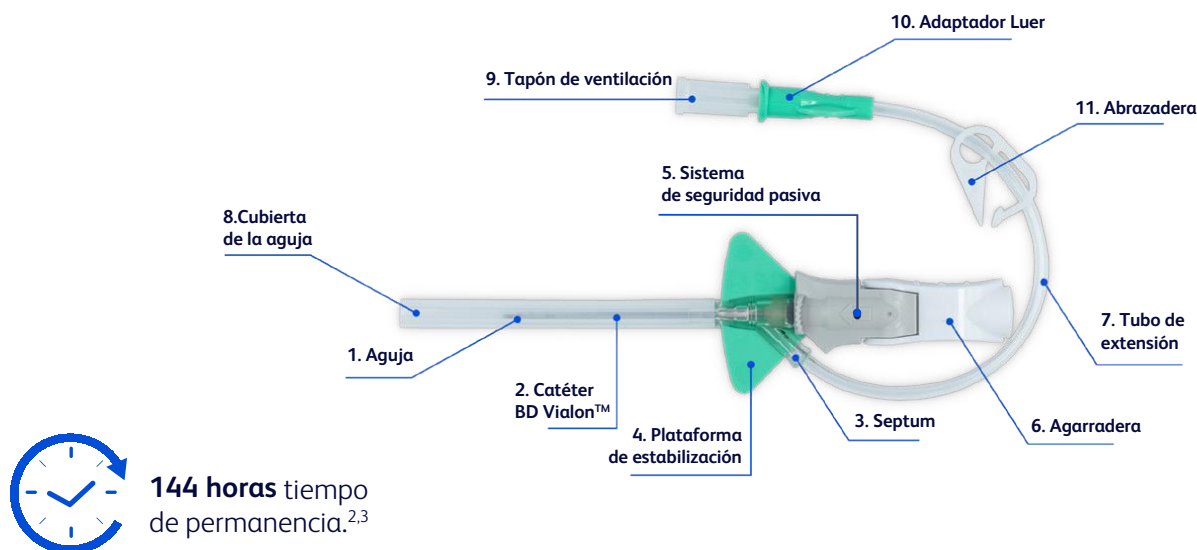

144 horas tiempo de permanencia.^{2,3}

SKU: 383512

BD Nexiva™ Doble puerto

Catálogo	Descripción	Tasa de flujo de gravedad (mL/min)	Extensión del tubo (mm)	Diámetro Exterior (mm)	Diámetro Interior (mm)	Unidad mínima de venta	Empaque secundario
 383539	18 GA x 1.25 in	84	1.65	1.31	0.98	Caja con 80 pzas	Caja con 20 unidades
 383537	20 GA x 1.25 in	58	1.65	1.10	0.83	Caja con 80 pzas	Caja con 20 unidades
 383532	22 GA x 1.00 in	33	1.22	0.90	0.67	Caja con 80 pzas	Caja con 20 unidades
 383531	24 GA x 0.75 in	18	1.22	0.71	0.53	Caja con 80 pzas	Caja con 20 unidades

Escaneé el siguiente código para visualizar BD Nexiva™ en realidad aumentada.



Favor de revisar y confirmar la disponibilidad de nuestros productos en su región con su ejecutivo de ventas de BD.



PowerGlide Pro™

Catéter de línea media indicado para su uso hasta 29 días, el tiempo de inserción se reduce gracias a la técnica "sin contacto" que implica menos pasos en comparación con la técnica Seldinger modificada.


Las directrices de CDC recomiendan utilizar la técnica "sin contacto" al insertar líneas medias^a, fabricado en poliuretano termosensible, cuentan con una **guía integrada** diseñada para facilitar la inserción, tecnología **BD Instaflash™**.

Permite la inyección de medios de contraste y toma de muestra sanguínea.

PowerGlide Pro™

Catálogo	Descripción	Calibre (GA)	Longitud	Tasa de flujo de inyección de poder	Tope de seguridad del inyector	Volumen de cebado	Unidad mínima de venta	Empaque secundario
6F118080	18 GA x 8 cm	18	8 cm	7 mL/seg	325 PSI	0.16 mL	Caja con 10 piezas	Caja con 20 unidades
6F118100	18 GA x 10 cm	18	10 cm	7 mL/seg	325 PSI	0.17 mL	Caja con 10 piezas	Caja con 20 unidades
6F120080	20 GA x 8 cm	20	8 cm	5 mL/seg	325 PSI	0.13 mL	Caja con 10 piezas	Caja con 20 unidades
6F120100	20 GA x 10 cm	20	10 cm	5 mL/seg	325 PSI	0.15 mL	Caja con 10 piezas	Caja con 20 unidades
6F122080	22 GA x 8 cm	22	8 cm	2 mL/seg	325 PSI	0.13 mL	Caja con 10 piezas	Caja con 20 unidades

Charola básica	6F118080	6F118100	6F120080	6F120100	6F122080
Catéter de línea media PowerGlide Pro™	1	1	1	1	1
Dispositivo de estabilización Statlock™	1	1	1	1	1
Toalla con protector cutáneo.	1	1	1	1	1

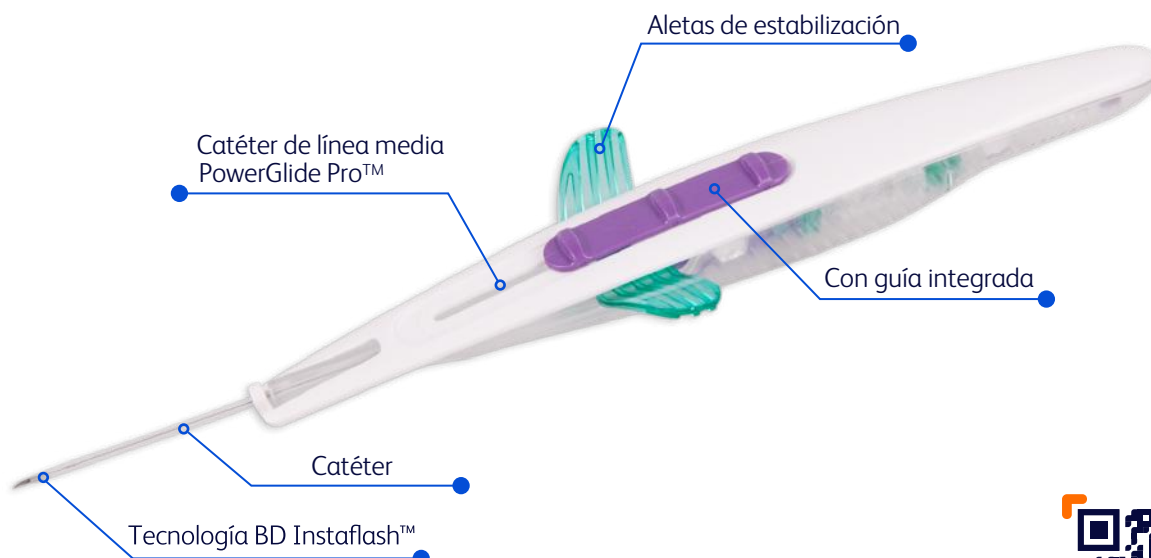

Escaneé el siguiente código para visualizar PowerGlide Pro™ en realidad aumentada.



Favor de revisar y confirmar la disponibilidad de nuestros productos en su región con su ejecutivo de ventas de BD.

a. Centers for Disease Control and Prevention. CDC guidelines for the prevention of catheter-related bloodstream infections, 2011. <https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/bsi-guidelines-H.pdf>. Accessed June 3, 2021

Provena™ Midlines


Catéter de línea media indicado para su uso hasta 29 días con una inserción con técnica MST (Técnica Seldinger Modificada).

- Fabricado en poliuretano.
- Diámetro exterior 14% más pequeño.
- Permite la inyección de medios de contraste.
- Tasa de flujo máxima de 6 mL/seg.
- Lúmenes equivalentes a 18 G.

Provena™								
Catálogo	Descripción	Longitud	Tasa de flujo de inyección de poder	Tasa de flujo de gravedad	Volumen de cebado	Límites de presión	Unidad mínima de venta	Empaque secundario
S64153118	3 Fr UL Provena™ Kit básico	20 cm	6 mL/seg	1,454 mL/hr	0.34 mL	325 PSI	Caja con 5 piezas	Caja con 1 unidad
S64244118	4 Fr UL Provena™ Kit básico	20 cm	6 mL/seg	1,298 mL/hr	0.35 mL	325 PSI	Caja con 5 piezas	Caja con 1 unidad

UL-Un lumen, DL-Doble lumen, TL-Triple lumen

Charola básica	Cantidad
Catéter de línea media Provena™	1
Jeringa de 12 mL	1
Dispositivo de estabilización StatLock™	1
Introducir periférico de seguridad, 20 GA	1
Cinta métrica	1
Guía metálica de nitinol	1
Bisturí de seguridad	1
Aguja introductora 21 GA	1
Tapón externo	1
Microintroducir MicroEZ™	1

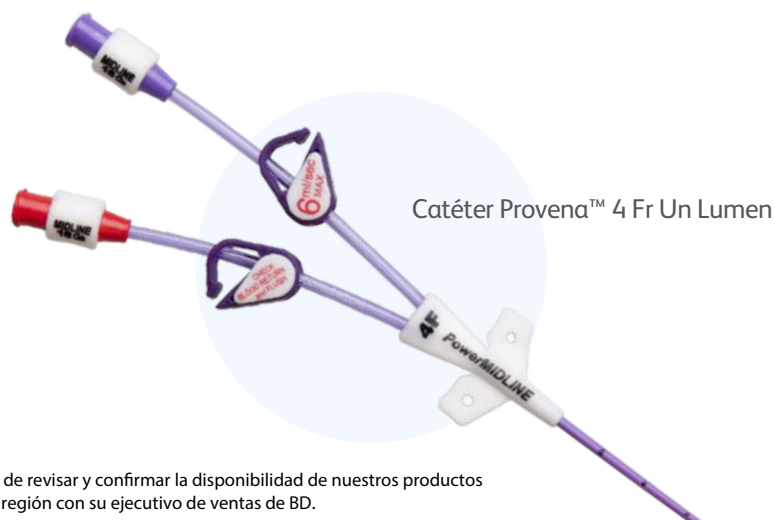

Escaneé el siguiente código para visualizar Provena™ en realidad aumentada.

Favor de revisar y confirmar la disponibilidad de nuestros productos en su región con su ejecutivo de ventas de BD.

PowerPICC™

El catéter PowerPICC™ es un **Catéter Central de Inserción Periférica** fabricado en poliuretano, indicado para terapia intravenosa >7 días y <12 meses. **Permite la inyección de medios de contraste, monitoreo de la presión venosa central y toma de muestra sanguínea.**

Catálogo	Descripción	Caudal de flujo (mL/hr)	Longitud de catéter (cm)	Diámetro Exterior (mm)	Unidad mínima de venta	Empaque secundario
8174118	UL, 4 Fr	1272	55	1.45	Caja con 5 piezas	Caja con 1 unidad
8275118	DL, 5 Fr	578	55	1.8	Caja con 5 piezas	Caja con 1 unidad
8375118	TL, 5 Fr	743 (rojo) y 280 (gris y blanco)	55	1.8	Caja con 5 piezas	Caja con 1 unidad

UL-Un lumen, DL-Doble lumen, TL-Triple lumen

Descripción de los componentes	8174118	8275118	8375118
Tapones Luer-Lock™	1	2	3
Cinta métrica	1	1	1
Dispositivo de estabilización StatLock™	1	1	1
Jeringa de 10 mL ó 12 mL	1	1	1
Guía flexible de nitinol con punta recta, 0,46 mm diám. ext. x 50 cm	1	1	1
Catéter IV periférico de seguridad, calibre 20 G (1,1 mm diám. ext. x 45 mm de longitud)	1	1	1
Microintrodutor MicroEZ™, de 5,0 Fr (1,8 mm diám. int. x 2,5 mm diám. ext. x 7cm de longitud) con dilatador de vaso (0,5 mm diám. int.)	0	1	1
Microintrodutor MicroEZ™, de 4,5 Fr (1,6 mm diám. int. x 2,3 mm diám. ext. x 7cm de longitud) con dilatador de vaso (0,5 mm diám. int.)	1	0	0
Aguja introductora, calibre 21 G (0,9 mm diám. ext x 0,45 mm diám. int. x 70 mm de longitud)	1	1	1
Bisturí de seguridad	1	1	1
Protector cutáneo	1	1	1



SKU: 8375118



Cinta métrica



Bisturí de seguridad



Guía metálica de nitinol



Catéter periférico corto (20 G)



Aguja introductora (21 G)



Microintrodutor pelable



PowerPICC™ Nursing




Tapones Luer-Lock™



Jeringa de 12 mL



Dispositivo de estabilización StatLock™

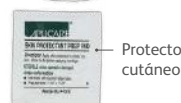

Protector cutáneo

Favor de revisar y confirmar la disponibilidad de nuestros productos en su región con su ejecutivo de ventas de BD.

PowerPICC Sherlock 3CG™ TCS

PowerPICC™ Sherlock 3CG™ TCS (Tip Confirmation System) es un **Catéter Central de Inserción Periférica** fabricado en poliuretano, indicado para terapia intravenosa >7 días y <12 meses. **Permite la inyección de medios de contraste, monitoreo de la presión venosa central y toma de muestra sanguínea.** La tecnología Sherlock 3CG™ permite el seguimiento pasivo y confirmación de la punta del catéter en tiempo real utilizando el ECG del paciente.

SKU	Descripción	Caudal de flujo (mL/hr)	Longitud del catéter (cm)	Diámetro exterior (mm)	Unidad mínima de venta	Empaque secundario
4174118	4Fr, UL	1272	55	1.4500	Caja con 5 piezas	Caja con 1 unidad
4275118	5Fr, DL	578	55	1.8000	Caja con 5 piezas	Caja con 1 unidad
4375118	5Fr, TL	743 (rojo) y 280 (gris y blanco)	55	1.8000	Caja con 5 piezas	Caja con 1 unidad

UL-Un lumen, DL-Doble lumen, TL-Triple lumen

Descripción de los componentes	4275118	4375118	4375118
Banda elástica azul	2	2	2
Conjunto de derivaciones de ECG	1	1	1
Tapón Luer-Lock™	1	2	3
Cinta métrica	1	1	1
Funda plástica para control remoto	1	1	1
Funda plástica para sensor Sherlock 3CG™	1	1	1
Dispositivo de estabilización StatLock™	1	1	1
Jeringa de 10 mL ó 12 mL	1	1	1
Guía flexible de nitinol con punta recta, 0.46 mm diám. ext. x 50 cm	1	1	1
Catéter IV periférico de seguridad, calibre 20 (1.1 mm diám. ext. x 45 mm de longitud)	1	1	1
Microintrodutor MicroEZ™, de 4.5 F (1.6 mm diám. int. x 2.3 mm diám. ext. x 7 cm de longitud) con dilatador de vaso (0.5 mm diám. int.)	1	0	0
Microintrodutor MicroEZ™, de 5.0 F (1.8 mm diám. int. x 2.5 mm diám. ext. x 7 cm de longitud) con dilatador de vaso (0.5 mm diám. int.)	0	1	1
Aguja introductora, calibre 21 (0.9 mm diám. ext. x 0.45 mm diám. int. x 70 mm de longitud)	1	1	1
Bisturí de seguridad	1	1	1
Protector cutáneo	1	1	1

Favor de revisar y confirmar la disponibilidad de nuestros productos en su región con su ejecutivo de ventas de BD.

PowerPICC™ Sherlock 3CG™ TCS

SKU: 4375118




Escaneé el siguiente código para visualizar PowerPICC™ Sherlock 3CG™ en realidad aumentada.



Cinta métrica



Bisturí de seguridad

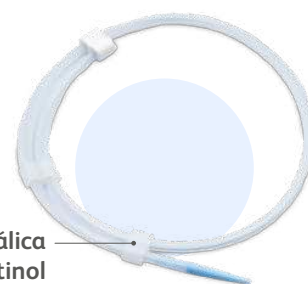


Guía metálica de nitinol



Catéter periférico corto (20 G)



Aguja introductora (21 G)

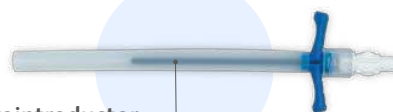

Microintrodutor pelable

Jeringa de 10 mL



Tapones Luer-Lock™



Dispositivo de estabilización Statlock™



Protector cutáneo



Conjunto de derivaciones de ECG

Favor de revisar y confirmar la disponibilidad de nuestros productos en su región con su ejecutivo de ventas de BD.

Niagara™ y Niagara Slim Cath™

La familia de catéteres Niagara™ y Niagara Slim Cath™ está indicada para un acceso vascular de corto plazo (menor a 30 días) **para hemodiálisis aguda, hemoperfusión y terapia de aféresis a través de la vena yugular, subclavia o femoral.^a**

Niagara™ Cath®

SKU	Descripción	Caudal de flujo (mL/hr)	Longitud del catéter (cm)	Diámetro exterior (mm)	Unidad mínima de venta	Empaque secundario
5594150	Eje precurvo, Doble Lumen, 13.5 Fr	400	15	4.5	Caja con 5 piezas	Caja con 1 unidad
5594200	Eje precurvo, Doble Lumen, 13.5 Fr	400	20	4.5	Caja con 5 piezas	Caja con 1 unidad
5593150	Recto, Doble Lumen 13.5 Fr	400	15	4.5	Caja con 5 piezas	Caja con 1 unidad
5593200	Recto, Doble Lumen 13.5 Fr	400	20	4.5	Caja con 5 piezas	Caja con 1 unidad

Descripción de los componentes	5594150	5594200	5593150	5593200
Tapa de inyección sin látex	2	2	2	2
Dilatador de vaso doble escalonado 11-13 Fr	1	1	1	1
Dilatador de vaso doble escalonado 12-14 Fr	1	1	1	1
Estilete extraíble	1	1	1	1
Ala de sutura acoplable	1	1	1	1
Vendaje transparente	2	2	2	2
Aguja introductora, 18 GA X2,75"	1	1	1	1
Guía de alambre, 70 cm x 1 mm	1	1	1	1

Niagara Slim-Cath™

SKU	Descripción	Caudal de flujo (mL/hr)	Longitud del catéter (cm)	Diámetro exterior (mm)	Unidad mínima de venta	Empaque secundario
5554150	Eje precurvo, Doble Lumen, 12 Fr	300	15	4	Caja con 5 piezas	Caja con 1 unidad
5554200	Eje precurvo, Doble Lumen, 12 Fr	300	20	4	Caja con 5 piezas	Caja con 1 unidad
5553200	Recto, Doble Lumen, 12 Fr	300	20	4	Caja con 5 piezas	Caja con 1 unidad
5553150	Recto, Doble Lumen, 12 Fr	300	15	4	Caja con 5 piezas	Caja con 1 unidad

Descripción de los componentes	5554150	5554200	5553150	5554200
Tapa de inyección sin látex	2	2	2	2
Dilatador de vaso doble escalonado 11-13 Fr	1	1	1	1
Ala de sutura acoplable	1	1	1	1
Vendaje transparente	2	2	2	2
Aguja introductora, 18 GA x 2,75"	1	1	1	1
Guía de alambre, 70 cm x 1 mm	1	1	1	1


a. IFU REF-28442 Niagara-Niagara Slim-Cath IFU_0724170 1003R_Multilingual (v0.1)

REF-57777 Niagara

Favor de revisar y confirmar la disponibilidad de nuestros productos en su región con su ejecutivo de ventas de BD.



Niagara™ y Niagara Slim Cath™

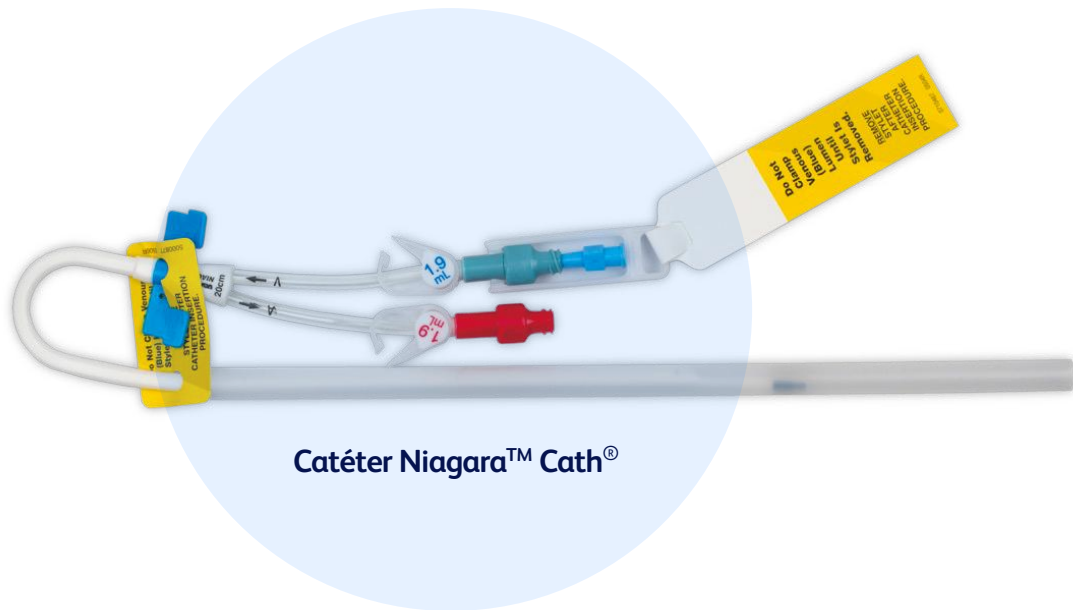

Tapa de inyección
sin látex



Dilatador de vaso
doble escalonado
11 Fr - 13 Fr



Alambre guía, 70 cm
x 1 mm



Aguja introductora,
18 G x 2.75"



Vendaje
transparente



Escaneé el siguiente código
para visualizar Niagara™
en realidad aumentada.

Agujas tipo Huber de seguridad para puerto implantable con alas que permiten **la inyección de medios de contraste**. Elaborada con acero inoxidable, con pinza y sitio de inyección en “Y” para acceso secundario.

SKU	Descripción	Sitio en “Y”	Caudal de potencia de inyección (mL/seg)	Volumen de cebado (mL)	Tasa de flujo de gravedad (mL/hr)	Unidad mínima de venta	Empaque secundario
8651910	19 GA x 1 in	No	5	0.3	1680	Caja con 20 piezas	Caja con 1 unidad
8651915	19 GA x 1.5 in	No	5	0.3	1680	Caja con 20 piezas	Caja con 1 unidad
8651934	19 GA x 0.75 in	No	5	0.3	1680	Caja con 20 piezas	Caja con 1 unidad
8652010	20 GA x 1 in	No	5	0.3	960	Caja con 20 piezas	Caja con 1 unidad
8652015	20 GA x 1.5 in	No	5	0.3	960	Caja con 20 piezas	Caja con 1 unidad
8652034	20 GA x 0.75 in	No	5	0.3	960	Caja con 20 piezas	Caja con 1 unidad
8652210	22 GA x 1 in	No	2	0.3	312	Caja con 20 piezas	Caja con 1 unidad
8652215	22 GA x 1.5 in	No	2	0.3	312	Caja con 20 piezas	Caja con 1 unidad
8652234	22 GA x 0.75 in	No	2	0.3	312	Caja con 20 piezas	Caja con 1 unidad
8671910	19 GA x 1 in	Si	5	0.4	1680	Caja con 20 piezas	Caja con 1 unidad
8671915	19 GA x 1.5 in	Si	5	0.4	1680	Caja con 20 piezas	Caja con 1 unidad
8671934	19 GA x 0.75 in	Si	5	0.4	1680	Caja con 20 piezas	Caja con 1 unidad
8672010	20 GA x 1 in	Si	5	0.4	960	Caja con 20 piezas	Caja con 1 unidad
8672015	20 GA x 1.5 in	Si	5	0.4	960	Caja con 20 piezas	Caja con 1 unidad
8672034	20 GA x 0.75 in	Si	5	0.4	960	Caja con 20 piezas	Caja con 1 unidad
8672210	22 GA x 1 in	Si	2	0.4	312	Caja con 20 piezas	Caja con 1 unidad
8672215	22 GA x 1.5 in	Si	2	0.4	312	Caja con 20 piezas	Caja con 1 unidad
8672234	22 GA x 0.75 in	Si	2	0.4	312	Caja con 20 piezas	Caja con 1 unidad



Escaneé el siguiente código para visualizar PowerLoc™ en realidad aumentada.




Favor de revisar y confirmar la disponibilidad de nuestros productos en su región con su ejecutivo de ventas de BD.

Agujas tipo huber de seguridad para puerto implantable con alas que permiten la inyección de medios de contraste. Elaborada con acero inoxidable, con pinza y sitio de inyección en “Y” para acceso secundario.

SafeStep™ tiene un cabezal giratorio para maniobras y posicionamiento seguro. Tiene un **diseño pequeño y estable**, ideal para la comodidad del paciente y fácil de cubrir. Cuenta con un **cojinete**, que proporciona mayor comodidad.

Catálogo	Descripción	Conector libre de aguja	Sitio en “Y”	Volumen de cebado (mL)	Tasa mínima de flujo (mL/hr)	Unidad mínima de venta	Empaque secundario
LH-0039	19 G x 0.50 in	No	No	0.3	1680	Caja con 25 piezas	Caja con 1 unidad
LH-0033	19 G x 0.75 in	No	No	0.3	1680	Caja con 25 piezas	Caja con 1 unidad
LH-0034	19 G x 1.00 in	No	No	0.3	1680	Caja con 25 piezas	Caja con 1 unidad
LH-0040	19 G x 1.50 in	No	No	0.3	1680	Caja con 25 piezas	Caja con 1 unidad
LH-0037	20 G x 0.50 in	No	No	0.3	960	Caja con 25 piezas	Caja con 1 unidad
LH-0031	20 G x 0.75 in	No	No	0.3	960	Caja con 25 piezas	Caja con 1 unidad
LH-0032	20 G x 1.00 in	No	No	0.3	960	Caja con 25 piezas	Caja con 1 unidad
LH-0038	20 G x 1.50 in	No	No	0.3	960	Caja con 25 piezas	Caja con 1 unidad
LH-0035	22 G x 0.50 in	No	No	0.3	312	Caja con 25 piezas	Caja con 1 unidad
LH-0029	22 G x 0.75 in	No	No	0.3	312	Caja con 25 piezas	Caja con 1 unidad
LH-0030	22 G x 1.00 in	No	No	0.3	312	Caja con 25 piezas	Caja con 1 unidad
LH-0036	22 G x 1.50 in	No	No	0.3	312	Caja con 25 piezas	Caja con 1 unidad
LH-0039YN	19 G x 0.50 in	Sí	Sí	0.7	1680	Caja con 25 piezas	Caja con 1 unidad
LH-0033YN	19 G x 0.75 in	Sí	Sí	0.7	1680	Caja con 25 piezas	Caja con 1 unidad
LH-0034YN	19 G x 1.00 in	Sí	Sí	0.7	1680	Caja con 25 piezas	Caja con 1 unidad
LH-0040YN	19 G x 1.50 in	Sí	Sí	0.7	1680	Caja con 25 piezas	Caja con 1 unidad
LH-0037YN	20 G x 0.50 in	Sí	Sí	0.7	960	Caja con 25 piezas	Caja con 1 unidad
LH-0031YN	20 G x 0.75 in	Sí	Sí	0.7	960	Caja con 25 piezas	Caja con 1 unidad
LH-0032YN	20 G x 1.00 in	Sí	Sí	0.7	960	Caja con 25 piezas	Caja con 1 unidad
LH-0038YN	20 G x 1.50 in	Sí	Sí	0.7	960	Caja con 25 piezas	Caja con 1 unidad
LH-0035YN	22 G x 0.50 in	Sí	Sí	0.7	312	Caja con 25 piezas	Caja con 1 unidad
LH-0029YN	22 G x 0.75 in	Sí	Sí	0.7	312	Caja con 25 piezas	Caja con 1 unidad
LH-0030YN	22 G x 1.00 in	Sí	Sí	0.7	312	Caja con 25 piezas	Caja con 1 unidad
LH-0036YN	22 G x 1.50 in	Sí	Sí	0.7	312	Caja con 25 piezas	Caja con 1 unidad

Escaneé el siguiente código para
visualizar SafeStep™ en realidad
aumentada.

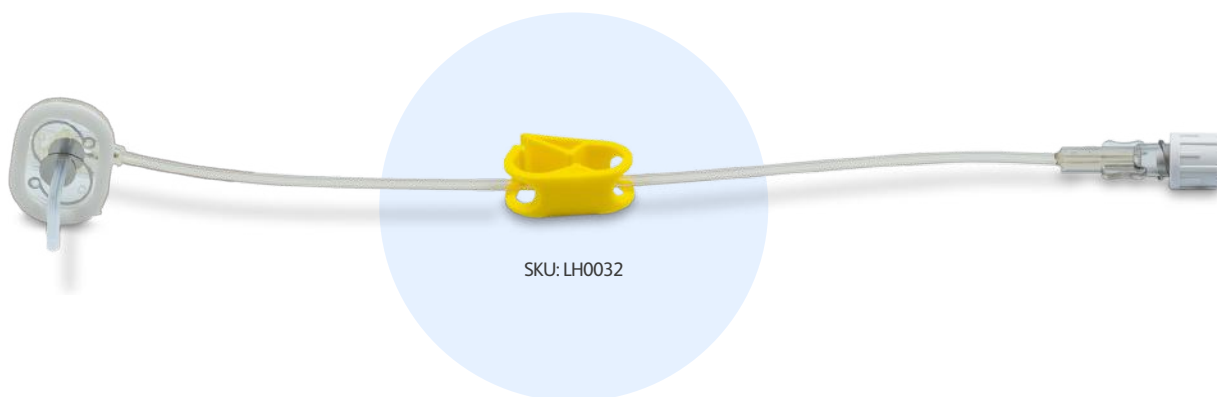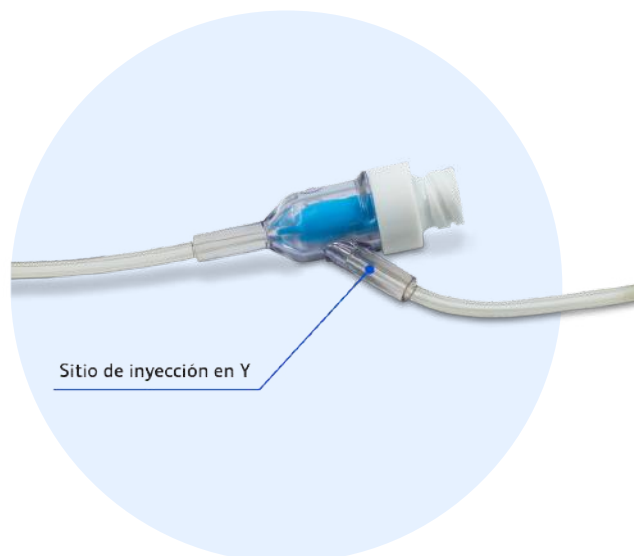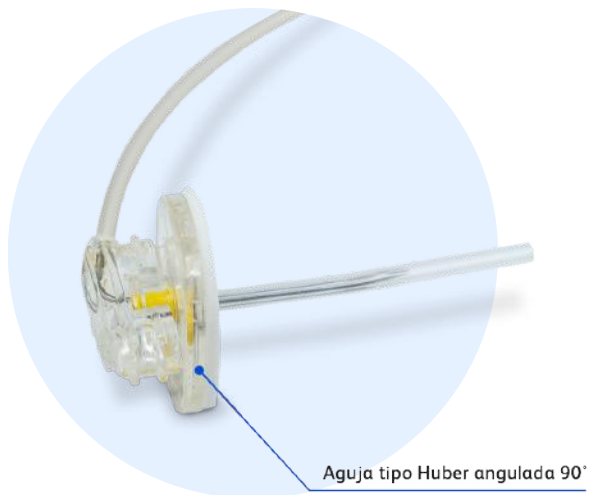

Favor de revisar y confirmar la disponibilidad de nuestros productos en su región con su ejecutivo de ventas de BD.

Site-Rite™ 8

Ultrasonido vascular compatible con la tecnología Sherlock 3CG™ que permite el **seguimiento y confirmación final de la punta del catéter en tiempo real**. También permite la identificación y medición del diámetro de los vasos sanguíneos para seleccionar el tamaño adecuado y no ocupar mas del 45% de la vena según recomendaciones de la INS.¹



SKU: 9770660

Catálogo

Descripción

9770660	Ultrasonido Vascular Site-Rite™ 8
9770601	Transductor desmontable 32 mm adulto
9770603	Transductor desmontable 20 mm pediátrico

Catálogo

Descripción

9770206	Sistema de soporte con ruedas para Site-Rite™ 8
---------	---



SKU: 9770206

Sherlock 3CG+™

Sistema de confirmación de punta basado en el rastreo pasivo y la actividad eléctrica cardiaca (ECG) del paciente (Onda P), el cual permite visualizar en tiempo real la ubicación, seguimiento y confirmación de la punta del catéter.



SKU: 9770378

Catálogo

Descripción

9770373	Sensor Sherlock 3CG+™ Pediátrico
9770378	Sensor Sherlock 3CG+™ Adulto

Escaneé el siguiente código para visualizar Site-Rite™ 8 + Sherlock 3CG+™ en realidad aumentada.



Favor de revisar y confirmar la disponibilidad de nuestros productos en su región con su ejecutivo de ventas de BD.

Kits de guías de aguja y cubiertas de sonda

Los kits de guías de aguja proporcionan una orientación (ángulo y profundidad) fija de la **aguja**, permitiendo el acceso preciso a las estructuras vasculares. Las cubiertas de sonda de ultrasonido estériles crean una barrera estéril entre la sonda de ultrasonido y el paciente, como lo recomiendan las guías.⁴

Kit de guías de aguja compatibles con Site-Rite™ 8

Catálogo	Descripción	Largo x ancho	Unidad mínima de venta	Empaque secundario
900013B01	Kit de Guía de Aguja 21G	48"	10 piezas	Caja con 1 unidad

Cada kit de guías de aguja viene envuelto en un campo estéril con:

- Gel transductor estéril
- Kit de 3 guías de aguja
- 2 bandas elásticas
- 2 fundas de polietileno



Kit cubierta para transductor compatible con Site-Rite™ 8

Catálogo	Descripción	Largo x ancho	Unidad mínima de venta	Empaque secundario
9001C0197	Kit con Funda y Gel para transductor	48" x 6"	10 piezas	Caja con 1 unidad
9000096	Kit con Funda y Gel para transductor	96" x 6"	10 piezas	Caja con 1 unidad

Cada kit de cubierta de sonda viene envuelto en un campo estéril con:

- Cubierta de sonda = 1
- Bandas elásticas = 2
- Paquete de gel estéril = 1



Favor de revisar y confirmar la disponibilidad de nuestros productos en su región con su ejecutivo de ventas de BD.



BD, BD Logo y todas las marcas aquí mencionadas son propiedad de Becton Dickinson and Company 2024.
Material de carácter informativo, prohibido el uso para fines publicitarios.
Favor de revisar y confirmar la disponibilidad de nuestros productos en su región con su ejecutivo de ventas de BD.

Referencias:

1. Sociedad de enfermeras en terapia de infusión (INS). Terapia de infusión, normas de la práctica. J Infus Nurs. 2016; 39(1S): 1-171
2. González López J, Arribi Vilela A, Fernández Del Palacio E, et al. Indwell times, complications and costs of open vs closed safety peripheral intravenous catheters: a randomized study. J Hosp Infect. 2014;86(2):117-126.
3. Guenezan J, Marjanovic N, Drugeon B, et al. Chlorhexidine plus alcohol versus povidone iodine plus alcohol, combined or not with innovative devices, for prevention of short-term peripheral venous catheter infection and failure (CLEAN 3 study): an investigator-initiated, open-label, single centre, randomized-controlled, twoby-two factorial trial. Lancet Infect Dis. 2021
4. Marketing Clearance of Diagnostic Ultrasound Systems and Transducers. Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff. 2019; p.49. doi:FDA- 2017-D-5372.