



THUASNE®

Biflex® Self Adjust

—
Justerbar kompression
med integrerat system för
exakt kompressionsnivå.



BIFLEX Self Adjust

Modulär justerbar kompression för arm och ben


Biflex Self Adjust lämpar sig utmärkt för behandling av ödem (venösa ödem, lymfödem samt vid akuta ödem), kronisk venös insufficiens och vid behandling av lipödemrelaterade symptom.

Pressure Adjust – integrerat system


Pressure Adjust är ett integrerat system som används för att applicera korrekt kompressionsnivå på lår- och vaddelen. Guiden visar 3 nivåer:

- L** Låg = 20 mmHg, indikeras med ljusblått streck
- M** Medium = 30 mmHg, indikeras med blått streck
- H** Hög = 40 mmHg, indikeras med mörkblått streck

Systemet är helt integrerat och kräver inga extra tillbehör. När banden dras åt visar den integrerade guiden vilken kompressionsnivå som applicerats.

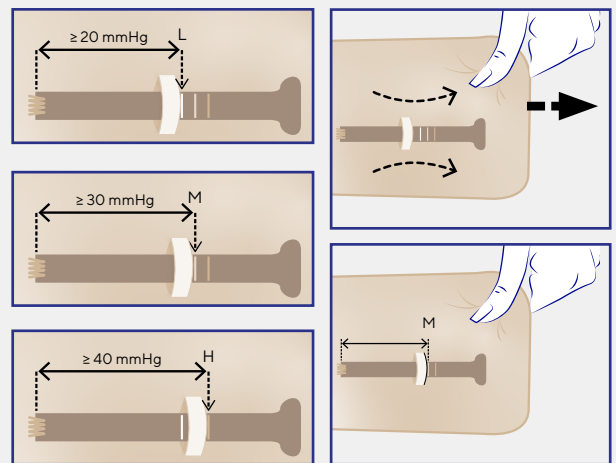


Pressure Adjust – ett integrerat system som visar applicerad kompression mellan 20 mmHg till 40 mmHg (ben) och 20 - 30 mmHg (arm).

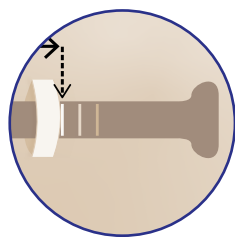


Integrerad guide för applicering av korrekt kompressionsnivå på knä- och lårdel

Latexfritt material som andas och släpper igenom fukt.

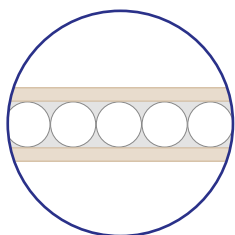


Ett materialskikt med öppna celler säkerställer god andningsförmåga

Genomtänkt design av bandagen gör att Biflex Self Adjust täcker hela hudytan och förhindrar fönsterödem.

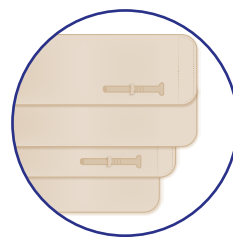

Överlappande design med bandage motverkar fönsterödem.

Enkel på- och avtagning

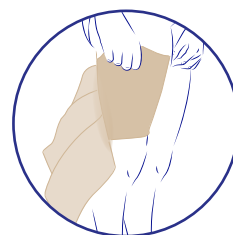

Integrerad tub för knä, lår och armstrumpa samt genomtänkt design med få bandage.



BIFLEX Self Adjust – sortiment



BIFLEX Self Adjust Justerbar **armdel**

art nr 183501

Justerbar ärm med breda kardborreband som dels föreklar påtagning och dels minimerar risken för fönsterödem. Armdelen kan vid behov kombineras med handdelen.

- **Integrerad tub** för enkel påtagning
- **Latexfritt** material som andas
- **Borttagbar rem** vid armbågen för ökad rörelsefrihet
- **6 standardstorlekar**



BIFLEX Self Adjust Justerbar **handdel**

art nr 181501

Justerbar handdel med genomtänkt design för god komfort i syfte att motverka ödemansamling i handdelen. Handdelen kan vid behov kombineras med armdelen.

- **Få bandage** för enkel hantering
- **Latexfritt** material som andas
- **Modulär design** som kombineras
- **3 standardstorlekar**



BIFLEX Self Adjust Justerbar **fotdel**

art nr 181001

Justerbar fotdel med lättare kompression för att motverka ödemansamling i foten. Fotdelen kan vid behov kombineras med vaddelen.

- **Få bandage** för enkel hantering
- **Latexfritt** material som andas
- **Modulär design** som kombineras
- **3 standardstorlekar**



BIFLEX Self Adjust Justerbar **vaddel**

art nr 183001

Justerbar vaddel med integrerat Pressure Adjust-system som visar exakt vilken kompression som applicerats. Vaddelen kan vid behov kombineras med knä- och fotdelen.

- Integrerad **Pressure Adjust**
- Integrerad **tub** för enkel påtagning
- **Överlappande** bandage
- **4 standardstorlekar**



BIFLEX Self Adjust Justerbar **knädel**

art nr 182001

Justerbar knädel med genomtänkt passform för att inte skava i knävecket. Knädelen kan vid behov kombineras med lår- och vaddelen.

- **Överlappande** bandage
- **Latexfritt** material som andas
- **Modulär design** som kombineras
- **3 standardstorlekar**



BIFLEX Self Adjust Justerbar **lårdel**

art nr 182501


Justerbar lårdel med integrerat Pressure Adjust-system som visar exakt vilken kompression som applicerats. Lårdelen kan vid behov kombineras med knädelen.

- Integrerad **Pressure Adjust**
- Integrerad **tub** för enkel påtagning
- **Överlappande** bandage
- **4 standardstorlekar**

BIFLEX Self Adjust

Alla mått är angivna i cm.

BIFLEX Self Adjust Justerbar armdel

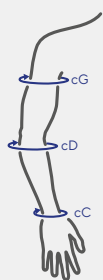

cG Omfång armhålan
cD Omfång överarmen
cC Omfång handleden

	Omfångsmått		
	cC	cD	cG
1	15 - 19	22 - 28	25 - 32
2	16 - 20	24 - 30	29 - 36
3	17 - 21	26 - 32	33 - 40
4	17 - 21	28 - 34	37 - 44
5	18 - 22	30 - 36	41 - 48
6	19 - 23	31 - 37	45 - 52


BIFLEX Self Adjust Justerbar handdel



cA Omfång handflatan

	Omfångsmått cA
1	14 - 19
2	19 - 24
3	24 - 29


BIFLEX Self Adjust Justerbar vaddel

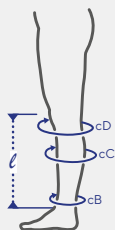

cD Omfång under knä
cC Omfång vad
cB Omfång ankel

	Omfångsmått		
	cB	cC	cD
1	16 - 24	24 - 35	25 - 36
2	20 - 28	32 - 43	32 - 43
3	24 - 32	40 - 51	39 - 50
4	28 - 36	48 - 59	46 - 57
ℓ B-D Normal			< 36
ℓ B-D Lång			> 36


BIFLEX Self Adjust Justerbar knädel

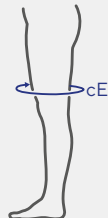

cE Omfång ovan knä

	Omfångsmått cE
1	35 - 50
2	50 - 65
3	65 - 85


BIFLEX Self Adjust Justerbar lårdel

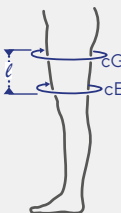

cG Omfång lår
cE Omfång ovan knä

	Omfångsmått	
	cE	cG
1	34 - 45	46 - 57
2	41 - 53	53 - 65
3	49 - 60	61 - 72
4	56 - 68	68 - 80
ℓ E-G Normal		< 36
ℓ E-G Lång		> 36

BIFLEX Self Adjust Justerbar fotdel

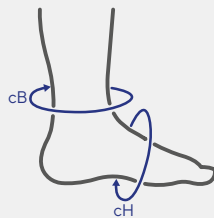

cB Omfång ankel
cH Omfång häl

	Omfångsmått	
	cB	cH
1	< 36	19 - 24
2	< 36	24 - 29
3	< 41	29 - 34

BIFLEX Self Adjust

Kombinera bendelarna efter behov

Biflex Self Adjust är ett modulärt justerbart system vilket innebär att du kombinerar de olika bendelar patienten har behov av. På så vis kan du erbjuda specifik behandling utan onödiga materialkomponenter.



WINGS FOR YOUR HEALTH

BIFLEX Self Adjust

Justerbar kompression med
integrerat system för exakt
kompressionsnivå.



Biflex Self Adjust is a medical device.
All the products mentioned on this document are class I medical devices, CE marked according to the European Regulation 2017/745 on medical devices. Please read carefully the instructions for use, indications and contraindications of the product.
Availability of these products might vary from a given country or region to another. Photos: Studio Caterin. Ref: 2306219 (06/2023).



THUASNE
120 rue Marius Auphan
92300 Levallois-Perret Cedex - France

THUASNE SCANDINAVIA AB
Box 95, 131 07 Nacka
Tel 08 - 618 74 50
E-post info@thuasne.se
www.thuasne.se