



CR
Carbon Rollator



Für mehr Spaß am Leben: Premium Qualität mit Vollausrattung

Der Saljol Carbon Rollator

Premium Qualität mit Vollausrattung

Das Gesamtpaket besteht aus Premium Carbon Rollator, Rückengurt, Tasche, Stockhalter, Klingel und LED-Licht.

Der Rückengurt lässt sich leicht anbringen und ist größenverstellbar. Dank der breiten, hohen Anlagefläche sitzen Sie deutlich bequemer. Die große Aussparung ermöglicht Ihnen freie Sicht auf den Gehweg, ein Reflektorstreifen erhöht die Sichtbarkeit. Die stabile Tasche können Sie mit einer Hand abnehmen. Für bessere Sicht- und Hörbarkeit im Straßenverkehr sorgen das an der Tasche angebrachte LED-Licht und die Klingel am Griff.

Sicherheit, die Sie spüren – „handschmiegsame“ Kork-TPE-Griffe mit Armlehne

Die Schiebegriffe sind aus hautfreundlichem Kork-TPE, das die Nachhaltigkeit, das geringe Gewicht und die Haptik von Naturkork mit der Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit von Kunststoffen verbindet. Sie bieten Ihnen dank ergonomischer Flügelform sicheren Halt und verhindern ein Abrutschen der Hände. Das stoßdämpfende und wärmespeichernde Material reduziert Schmerzen und fördert die Beweglichkeit Ihrer Hände und Finger, besonders bei sensibler Haut. Die rutschhemmenden, schnelltrocknenden Eigenschaften gewährleisten auch bei Nässe sicheren Komfort. Die Kork-TPE-Armlehne macht das Ablegen der Arme im Sitzen sehr angenehm. Da Kork ein natürlicher Bestandteil des Griffes ist, kann sich durch die Reaktion des Naturmaterials mit den Handflächen eine typische dunkle Patina bilden. Die Griffe sind trotzdem leicht zu reinigen und bleiben sauber.






Korkfarbene Designelemente führen durch die Funktionen der Saljol Rollatoren

Das Design erleichtert Ihnen dank korkfarbener, brauner Komponenten die intuitive Bedienung. Alle verstellbaren Elemente erkennen Sie dadurch sofort und ermöglichen Ihnen eine schnelle, sichere Anpassung an Ihren Bedarf. Die durchdachte Farbgestaltung sorgt für Übersichtlichkeit und maximalen Komfort im Alltag.

Sicherheit durch Sichtbarkeit

Über 30 Reflektoren und Reflektorstreifen am Rollator sorgen dafür, dass Sie bei schlechten Lichtverhältnissen gut erkennbar sind. Ob im Straßenverkehr oder bei Freizeitaktivitäten – die reflektierenden Elemente machen Sie mit Ihrem Rollator besser für andere Verkehrsteilnehmer erkennbar.

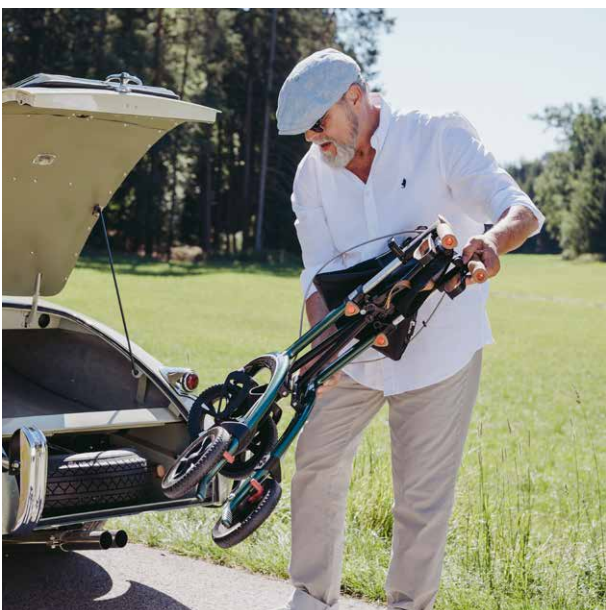

Kompakt faltbar – ideal für den einfachen Transport

Den Carbon Rollator können Sie mit einem Handgriff einfach und schnell auf nur 21 cm Breite falten. Im gefalteten Zustand kann er mit einem Haken sicher arretiert werden und lässt sich kompakt und stabil verladen. Dank des leichten Gewichts und der schmalen Maße transportieren Sie ihn problemlos im Auto oder auf Reisen.



Optionales Einhand-Bremssystem – mit einer oder beiden Händen bremsen für maximale Kontrolle ohne Aufpreis (auf Bestellung)

Der Umbau zur Einhand-Simultanbremse ermöglicht es Ihnen, den Rollator mit nur einer Hand komplett zu bremsen. Dieses Bremssystem ist besonders hilfreich bei altersbedingtem Kraftverlust oder einseitigen Einschränkungen, wie nach einem Schlaganfall, bei Parkinson oder Frakturen und ermöglicht Ihnen die einhändige Bedienung beider Bremsen mit geringem Kraftaufwand. Das dazu nötige, längere Bowdenzugkabel schicken wir Ihnen auf Anfrage kostenlos zu.



Höchste Qualität bis ins kleinste Detail – Sie fühlen es!

Die leichtgängigen Handbremsen ermöglichen Ihnen ein kräftesparendes Bremsen und sind auch für kleinere Hände einfach zu bedienen. Die ergonomische Form und die Kork-TPE-Verkleidung geben sicheren, komfortablen Halt. Betätigen Sie die Feststellbremse, signalisiert Ihnen ein deutliches Klickgeräusch, dass der Rollator sicher steht – ideal zum Hinsetzen oder Befüllen der Tasche.





Eingebaute Sicherheit: Schleifbremse für mehr Kontrolle beim Bergabfahren oder wenn mehr Stützkraft erforderlich ist

Höchste Sicherheit und Kontrolle beim Gehen stehen bei Ihnen an oberster Stelle? Die Schleifbremse am CR bietet Ihnen genau das. Der Rollwiderstand der Hinterräder lässt sich individuell einstellen, bremst sanft ohne zu blockieren (ABS) und verhindert, dass Ihr Rollator schneller rollt als Sie wollen – besonders hilfreich bei Gefällen. Die Bremse unterstützt Sie optimal bei Gangunsicherheiten, kann falschen Richtungsdrall ausgleichen und reduziert dadurch die Sturzgefahr. Einmal richtig eingestellt (de)aktivieren Sie sie mit dem Fuß.



Sehr leicht und stabil bei nur 5,6 kg Gesamtgewicht

Der Carbon Rollator ist mit nur 5,6 kg Gewicht und einer Breite von 61 cm besonders leicht und wendig. Das Gewicht ist bewusst gewählt und ein guter Kompromiss von Fahrstabilität und leichtem Handling. Zu leicht kann schnell zu unsicher werden, während zu schwer beim Verladen oder Tragen ein Hindernis darstellt.



Sicherer Halt für Ihren Gehstock – jederzeit griffbereit

Der universelle Stockhalter passt sich flexibel an verschiedene Gehhilfen und Gehstöcke an. Mit einem einzigartigen Arretierungssystem bleibt der Stock sicher fixiert und stets griffbereit. Durch ein Klickgeräusch hören Sie, dass der Stock sicher befestigt ist.





Das passende Produkt für Sie – erhältlich für jeden Bedarf

Saljol Premium Rollatoren sind in zwei Größen, edlen Farben und zusätzlich mit breiterer Sitzfläche (52 cm) und höherer Tragkraft (180 kg) erhältlich. So haben Sie die Möglichkeit, genau die Lösung zu wählen, die optimal zu Ihren Bedürfnissen und Ihrem persönlichen Geschmack passt. Ob für mehr Komfort, Funktionalität oder Stil – Sie finden die perfekte Kombination, die Ihren Anforderungen gerecht wird.



Abbildung zeigt AR62W





Deutsche Ingenieurskunst aus Bayern.

German Design



Großer Luxus, der erschwinglich bleibt

Saljol Rollatoren bieten Ihnen den perfekten Mix aus Funktionalität, Qualität und einem Hauch von Luxus. Deutsche Ingenieurskunst verbindet hochwertige Funktionen mit Komfort, die Ihren Alltag erleichtern – und das ganze Paket zu einem insgesamt fairen Preis.



Rundum gut betreut – für Ihre Mobilität und Sicherheit

Unsere Physiotherapeutin Katharina unterstützt Sie in allen Bereichen, in denen physiotherapeutisches Fachwissen gefragt ist. Unser hilfsbereiter Beratungsservice steht Ihnen jederzeit zur Seite – sei es im Sanitätshaus oder direkt bei uns. Bei Fragen oder Unsicherheiten rund um Ihren Saljol Carbon Rollator bieten wir Ihnen die Unterstützung, die Sie benötigen, um das Beste aus Ihrem Rollator herauszuholen.



Training rund um Ihren Rollator

Um medizinische Nebenwirkungen bei der Nutzung unserer Rollatoren zu vermeiden, haben wir Rollastic erfunden. Eine maßgeschneiderte Gymnastik für Rollatornutzer, die bei regelmäßiger Ausführung Beweglichkeit und Kraft bewahren kann. Spezielle Videos liefern wir mit dem Rollator.

Für Ihre Sicherheit im Straßenverkehr haben wir das Verkehrssicherheitstraining „Mobil mit Rollator“ entwickelt. Hilfreiche Tipps und Tricks finden Sie unter www.mobilitrollator.de.



Marietta: „Ich zeige mich gern mit meinem Rollator!“

„Ich leide an HMSN/CMT, einer neuromuskulären Erkrankung. Darum mag ich die ergonomisch geformten Griffe des Carbon Rollators, denn sie bringen mir mehr Stabilität. Die breite Auflagefläche ermöglicht es mir, mich sicher auf dem Rollator aufzustützen, wenn ich beispielsweise auf harten Untergründen Schmerzen in den Beinen bekomme. Anders als bei Plastikgriffen, macht Regen bei den Griffen nichts aus. Du rutschst nicht ab und hast auch nicht das Gefühl, die Hände wären feucht. Sicherheit ist nach wie vor da. Sie werden auch nicht so schnell kalt. Außerdem ist mein Carbon Rollator mein Porsche, mit dem kann ich auch schick ausgehen. Da habe ich keine Hemmungen.“



Carbon Rollator inklusive Rückengurt, Tasche, Stockhalter, LED-Licht und Klingel	CR54 699,00 €	CR62 699,00 €	CR62W 799,00 € <small>Nur in British Racing Green erhältlich</small>
Empfohlen für Körpergröße	145–170 cm	160–200 cm	160–200 cm
Maximales Nutzergewicht	150 kg	150 kg	180 kg
Gesamtgewicht ohne Zubehör	5,6 kg	5,6 kg	5,6 kg
Maximale Zuladung der Tasche	5 kg	5 kg	5 kg
Breite offen/geschlossen	61/21 cm	61/21 cm	68/21 cm
Sitzbreite	45 cm	45 cm	52 cm
Sitzhöhe	54 cm	62 cm	62 cm
Griffhöhe (einstellbar)	76–88 cm	81–103 cm	81–100 cm
Hilfsmittelnummer	10.50.04.1260	10.50.04.1260	beantragt

Carbon Rollator – Bestandteile der Vollausrüstung



Rückengurt
49,00 €



LED-Licht
10,00 €



Klingel
19,00 €



Stockhalter
19,00 €



British Racing
Green

Carbon Rollator – weiteres Zubehör



Transporttasche
89,00 €



Fester Sitz
59,00 €



Holztablett
mit Filzauflage
69,00 €



JOST-Tasche
schwarz
129,00 €



Midnight Blue



Schirm
karamell
89,00 €



Schirm
schwarz
89,00 €



Bremskabel für
den Umbau zur
Einhandbremse
0,00 €



Copper Red



Pure Gold